

KÄYTTÖOHJE FI  
Gyenno Bravo Twist



## Varoitukset

1. Älä aseta tai säilytä laitetta tulen tai korkean lämmön lähellä.
2. Älä käytä vahingoittunutta latauskaapelia tai vaurioitunutta pistorasiaa.
3. Älä käytä laitetta, jos käytät sydämentahdistinta tai sähköstimulaatiolaitetta.
4. Käyttäjien, jotka ovat allergisia lääkekumille, ei suositella tämän laitteen käyttöä.
5. Älä kytke tai vedä latauskaapelia ulos märin käsin.
6. Älä aseta itsediagnoosia laitteen keräämien tietojen perusteella.
7. Tämän laitteen käyttöä muiden laitteiden vieressä tai niiden kanssa tulee välttää, koska se voi johtaa virheelliseen käyttöön.
8. Muiden kuin tämän laitteen valmistajan määrittelemien tai toimittamien lisävarusteiden, kaapeleiden jne. käyttö voi lisätä sähkömagneettista säteilyä tai heikentää laitteen sähkömagneettista häiriönsietoa ja johtaa virheelliseen käyttöön.

## HUOM:

1. Älä upota laitetta, paitsi ruokailuvälinepäitä, mihinkään nesteeseen.
2. Älä käytä laitetta sen latautuessa.
3. Jos laite putoaa nesteeseen latauksen aikana, irrota johto välittömästi ja kuivaa laite.
4. Ruokailuvälinepäitä ei saa desinfioida tai käyttää mikroaaltouunissa
5. Kahvaa ei saa pestä astianpesuvedessä, desinfioida tai käyttää mikroaaltouunissa.
6. Älä käytä tätä laitetta voimakkaassa magneettisessa ympäristössä.
7. Älä ylitä laitteen enimmäiskuormitusta. (Enimmäispaino 15 g).
8. Älä pura tai yritä korjata laitetta tai sen osia.

*Puhdista ruokailuvälineet ennen käyttöä.*

## Vinkkejä

Ahdistus ja hermostuneisuus voivat pahentaa vapinaa, joten yritä rentoutua. Voi kestää muutaman päivän tottua uuteen ruokailutapoihin. Kun käytät Gyennoa ensimmäistä kertaa, yritä käyttää sitä yksityisesti ja ole rauhallinen.

Ensimmäisen jakson aikana sinun on aktiivisesti vaihdettava eri pitoasentoja ja säädettävä kulmaa ja suuntaa sopivimman kokoonpanon löytämiseksi.

Kun käyttäjän on opeteltava uusi ruokailutapa, aloittelijoita kehoitetaan käyttämään vähintään viikko tehon testaamiseen ja sopeutumiseen uuteen menetelmään.

Käytä isoa ja matalaa kulhoa, jotta Gyennolla on riittävästi tilaa ja hyvät kulmat.

Älä kohdista ulkoisia voimia Gyennoa pitelevään käsivarteen, yritä rentoutua, anna käsivarren tärinä luonnollisesti ja anna Gyennon suorittaa tehtävänsä.

Aterimet tarttuvat kahvaan magneetilla, kun ruokailuvälineet asetetaan lähelle kahvaa.



## Helppoa! Aseta ruokailuvälineet paikalleen, paina virtapainiketta ja olet valmis syömään.

### On/off-painike:

1. Lyhyt painallus kytkee laitteen päälle tai pois päältä.
2. Paina 5 sekuntia: Laite siirtyy wifi-määrittystilaan. Tarvitaan, jos halutaan tallentaa liikkeet.

Gyenko sammuu, jos sitä ei ole käytetty 5 minuuttiin.

### Merkkivalo:

#### Väri

Vilkkuva vihreä

Vihreä

Sykkivä sininen

Vilkkuva sininen

Vilkkuva punainen

Punainen

Vilkkuva keltainen

Keltainen

Vuorotellen keltainen/  
punainen

Vuorotellen

vihreä/keltainen

#### Tila

Valmiina käytettäväksi

Täyteen ladattu

Kerää tietoja

Wifi yhdistetty tai tiedonsiirto

Vähäinen virta

Akku

Laturi

Wi-Fi-määrittelyn aikana:


Wifiä ei ole yhdistetty

Ladataan/ei yhdistetty WiFi-  
verkkoon

Täysin ladattu/yhdistetty WiFi-  
verkkoon




Aterimet tarttuvat kahvaan magneetilla, kun ruokailuvälineet asetetaan lähelle kahvaa.

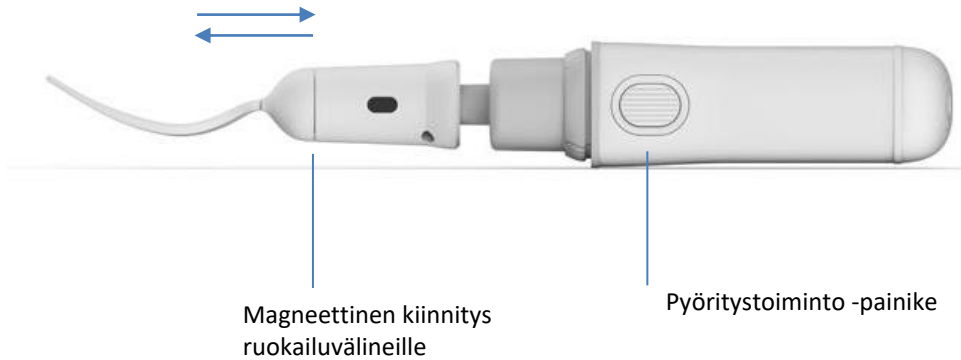

Varmista, että ruokailuvälineet ovat kunnolla kiinni kahvassa ennen kuin aloitat syömisen.

Käyttäjien, joilla on voimakas vapina, kiinnitä käsihihna ennen Gyennon käyttöä, jotta se ei menetä sitä syömisen aikana.

Pidä pyöritystoimintonappia aina vartaloasi vasten, kun käytät Gyennoa varmistaaksesi oikean tiedonkeruun ja avun syömisessä.

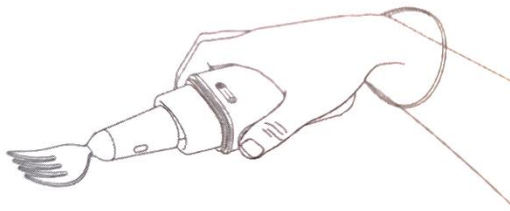

Suosittellemme pitämään kiinni Gyennosta kuten yllä olevassa kuvassa, mutta jokaisen on silti löydettävä itselleen parhaiten sopiva oteasento. Käytä aikaa että löydät sinulle parhaan otteen.

Latausaika n. 3 tuntia, jonka jälkeen kestää n. 3 päivää.  
(Riippuen aterioiden lukumäärästä ja niiden pituudesta).