

Suksee -pyörätuolisukset



Asennusohje:

- Kohota pyörätuolin toista sivua siten, että molemmat renkaat nousevat hieman ilmaan.
- Ujuta sukki renkaiden alle.
- Asenna oikealle puolelle se sukki, jonka soljet ovat oikeassa reunassa.
- Laita renkaat suksessa olevaan uraan. Laita takapyörä mahdollisimman taakse.
- Asenna takapyörän kiinnitysnauhat joko vanteen ympäri tai jos tuolissa on pinnasuojat, tuolin runkoputken ympäri mahdollisimman läheltä pyörän akselia.
- Kiinnitä etupyörän kiinnitysnauhat joko vanteen ympäri tai jostakin sopivasta paikasta kuitenkin mahdollisimman alhaalta.
- Kiinnitä muovisoljet ja vedä nauhat tiukalle. Kiristä ensin hiukan kaikkia ja vasta sitten lopulliseen tiukkuuteensa.
- Asenna toisen puolen sukki vastaavasti. Jos käytät sukksia vain yhdessä pyörätuolissa, voit katkaista ylimääräisen nauhan pois. Huom! Jätä kuitenkin hiukan kiristysvaraa uudelleen asentamista varten. Huom! Katkaistua nauhan päätä pitää hieman sulattaa esimerkiksi sytkärillä, jotta nauha ei purkaudu.

HUOM!

PYÖRÄTUOLIN KÄYTTÖ SUKSET ASENNETTUNA VAATII AINA AVUSTAJAN KÄYTÖN.

VAROITUS!

SUKSISSA EI OLE JARRUJA!

ÄLÄ KOSKAAN JÄTÄ PYÖRÄTUOLIA VARTIOIMATTA KUN SUKSET ON ASENNETTUNA!

Valmistaja:
HT Suksee
Laukkukuja 10
90940 JÄÄLI
Puh. 040-760 6637
www.htsuksee.fi
myynti@htsuksee.fi