

Lisävarusteet



Sivupehmusteet

Extra sivuttais-
tuentaan
Voidaan käyttää
myös pääohjauksen
painikkeena

(Part SAVANT-SP)

Indikaatiot

Savant-päätuen käyttöaiheet ovat päätuen
tarve pyörätuolissa istuessa kompensoimaan
vamman aiheuttamaa pään tai kaulan lihas-
hallinnan heikentymistä / menetystä.

Tarkoitettu käyttäjille jotka tarvitsevat päätukea,
mikä aiheuttaa, mutta ei rajoittuen, esim.
seuraaviin diagnooseihin: artriitti,
mutilpusselkleroosi, Drop Head oireyhtymä (DHS),
säteilysfibroosioireyhtymä tai muu motorinen/
neurologinen sairaus.

Kontraindikaatiot

Savant päätukea EI tule käyttää, jos pään tai
niskan liikerajoitteet aiheuttavat vaikeuksia
hengittää, niellä tai jo olemassa olevan tilan
pahenemista. Vain pätevä terveydenhuollon
ammattilainen saa asentaa tämän laitteen.

Huomautus käyttäjälle:

Kaikista vakavista tapaturmista tulee ilmoittaa
valmistajalle ja toimivaltaiselle viranomais-
taholle, johon käyttäjä ja/tai potilas kuuluu.

Adapterit & Kiinnitysosat

Whitmyer/Stealth Adapteri

19 mm:n Whitmyer-pallonivelen ja
17 mm:n Stealth-pallonivelen
asennukseen

(Part WA-19)



Netti Adapteri
Netti-tuolien
kiinnikkeiden
asennukseen

(Part NA-250 or NA-150)

R82 Adapterit

R82:n päätukien asennus
Axion- ja Savant-päätukeen
ja Twin -päätuen
kiinnitysvarteen

(Part SS-R82-25 or SSR82)



**Twin Flip päätuen
kiinnitysvarsi**

Mahdollistaa päätuen
kääntämisen taaksepäin.
Erinomainen ratkaisu
siirtotilanteisiin.

(Part TWIN FLIP)

Saatavana myös Flip+
(Part TWIN FLEX-FLIP)

Twin Dynamic päätuen kiinnitysvarsi

Kiinnitysvarressa on
dynaaminen, jousitettu
päätuen kiinnike, joka
vaimentaa syvyys-
suuntaista voimaa.
Mukana jäykempi ja
pehmeämpi jousi.

(Part TWIN DYN)



Savant
päätuki



Päätuki
pyörätuoliin
täydelliseen pään
hallintaan

Päätuki Savant™

on ainutlaatuinen päätuki pään hallintaan.

Tukee päätä kolmelta korkeudelta.
Sivuttais-, syvyys- ja rotaatiotuenta.

Otsapannalla myös etutuenta.

Savant on hiostamaton, kevyt ja
sitä on helppo muotoilla käsin.

Koon valinta

Savant on saatavana 3 kokoa:

- Adult
- Small
- Pediatric



Asiakkaan koon mittaaminen

Pään ympärysmitta	Inches	cm
Adult	22 - 24	56 - 61
Small	18 - 22	46 - 56
Pediatric	14 - 18	36 - 46
1/2 ympärysmitta korvien takaa		
Adult	8 - 9	20 - 30
Small	6 - 7	15 - 18
Pediatric	5 - 6	13 - 15

Päätukien mittatiedot

Korkeimman pehmusteen sisämitta	Inches	cm
Adult	14	36
Small	12	30
Pediatric	9	23
Keskimmäisen pehmusteen sisämitta		
Adult	8	20
Small	7	18
Pediatric	5	13
Päätuen korkeus		
Adult	6	15
Small	5	13
Pediatric	4.5	12

Sovitusohjeet

Saatavana useita eri konfiguraatioita:



Savant-päätuen sisällä on ainutlaatuinen metallitukirakenne, joka on mahdollista muotoilla sopivaksi käsin ilman työkaluja.



Asennuslevyyn mahtuu 1" (25 mm) pallonivel. Levy voidaan irrottaa kustomoidun päätukikiinnikkeen kiinnittämiseksi M5-ruuveilla. Saatavana mm. Netti-, Whitmyer- ja Stealth-adapterit.



Savantin mukana tulee otsapanta, jota voidaan käyttää pään etuosan tukemiseen. Savantia voi käyttää otsapanta kanssa tai ilman.

Ominaisuudet

Savant Headrest™

on hiostamaton, kevyt ja helposti käsinmuotoiltava. Geelipehmusteet antavat pehmeän, räätälöidyn pään tuen kolmella tasolla: ohjaa sivuttaisliikettä, flexiota ja rotaatiota. Matala profiillinen otsapanta tukee pään etuosaa.



Hyödyt ja edut sovittajalle:

- Helppo sovittaa (voidaan muotoilla käsin)
- Helppo kiinnittää tavallisella Vakio-päätuen kiinnikkeellä
- Valinnainen otsapannan käyttö (mukana toimituksessa) etusuuntaisen lisätuen saamiseksi
- Pehmusteet on helppo muotoilla uudelleen käsin, jos käyttäjän asentoa halutaan muuttaa
- QR-pikakiinnikkeet pitävät otsapannan paikallaan.
- Helppo vapauttaa hienosäätöä varten

Hyödyt ja edut asiakkaalle ja hoitajalle:

- viileä ja mukava päätuki, modulaarinen rakenne mahdollistaa hyvän ilmankierron
- helppo pukea ja irrottaa
- matala profiili; huomaamaton ulkonäkö
- helppo pitää puhtaana (pyyhintä saippualla ja vedellä + ilmakuivaus)
- täydellinen pään hallinta
- alhainen lämpö

Symmetric Designs ei ota vastuuta tämän tuotteen virheellisestä käytöstä.