

Käyttöohje Adam -työtuoli



msp 

Sisällysluettelo

Esipuhe	3
Käyttötarkoitus	4
Turvallisuusohjeet	5
Valmistelut	6
Toimitettujen osien kuvaus	7
Toiminnot	9
Istuutuminen ja nouseminen Adam-työtuolilta	11
Puhdistus- ja desinfiointiohjeet	12
Puhdistuksen ja desinfioinnin vaiheet	13
Vaihe 1 - Näkyvän lian poistaminen	13
Vaihe 2 - Yleispuhdistusaineen käyttö	13
Vaihe 3 - Desinfiointiaineen käyttö	13
Vaihe 4 - Loppusiivous	13
Akun käsittelyohjeet	14
VAROITUS	14
Säilytys.....	14
Adam-tuolin lataaminen	15
Ennaltaehkäisevä huolto-ohjelma	16
Vuositarkastus	17
Ei-suositeltu käyttö	18
Ongelmatilanteiden ratkaisu	18
Tekniset tiedot	19
Mitat ja säädöt	20
Merkinnät	20
Varaosat ja lisävarusteet	21
Huomautukset / Muistiinpanot:	22

Esipuhe

Hyvä asiakas,

Kiitos, että valitsit MSP Medical Productsin Adam -työtuolin! Toivomme, että se palvelee sinua mukavasti ja käytännöllisesti vuosien ajan.

Adam-työtuoli tarjoaa monia vaihtoehtoja, jotka auttavat sinua istumaan ja liikkumaan mukavasti ja ergonomisesti. Suosittelemme lukemaan tämän käyttöohjeen huolellisesti, jotta voit tutustua tuolin tarjoamiin ominaisuuksiin.

Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä jälleenmyyjäsi tai meihin suoraan – autamme mielellämme.




Parhain terveisin,
MSP-tiimi

Yleiset tiedot

MSP suosittelee käyttämään aina alkuperäisiä varaosia. Nämä osat on suunniteltu ja valmistettu erityisesti Adam-työtuolia varten. Käyttämällä alkuperäisiä varaosia minimoit vaaratilanteiden ja vammojen riskin, jotka voivat aiheutua epäaitojen osien käytöstä.

MSP kehittää ja parantaa jatkuvasti tuotteitaan, ja siksi pidätämme oikeuden muuttaa teknisiä tietoja ilman ennakoilmoitusta.

Jos käyttöohjeessa esiintyy seuraavat termit, niiden merkitys on seuraava:

-  **VAROITUS:**
Varoitusten laiminlyönti voi aiheuttaa vammoja sinulle tai muille.
-  **HUOMIO:**
Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi vahingoittaa koko tuolia tai sen osia.
-  **HUOMAUTUS:**
Tämä huomautus on tärkeä tuolin oikean toiminnan kannalta.

Lue tämä käyttöohje huolellisesti

Pyydämme sinua lukemaan tämän käyttöohjeen tarkasti ennen Adam-työtuolin käyttöönottoa. Tämä ohje sisältää olennaista tietoa tuolisi asianmukaisesta toiminnasta ja huollosta sekä auttaa ehkäisemään mahdollisia loukkaantumisia väärinkäytön seurauksena.

Epäviralliset muutokset voivat vaarantaa tuolin turvallisuuden. Medical Spare Parts B.V. ei ole vastuussa onnettomuuksista, vahingoista tai lyhentyneestä käyttöiästä, jotka johtuvat tällaisista muutoksista.

Käyttötarkoitus

Adam-työtuolia tulee käyttää sen alkuperäisen käyttötarkoituksen ja turvallisuusohjeiden mukaisesti. Jos sinulla on epäselvyyksiä, ota yhteyttä jälleenmyyjäsi tai suoraan meihin.

Tämä laite on suunniteltu käytettäväksi työtuolina ja on tarkoitettu ensisijaisesti yksityiskäyttöön. Tuolin tarkoituksena on helpottaa käyttäjän arkea sen korkeussäädön, kevyesti liikkuvien pyörien ja ergonomisen muotoilun ansiosta.

Käyttjäarviointi:

Tämä laite on tarkoitettu käyttäjille, jotka täyttävät seuraavat suositukset:

- Käyttäjän paino on enintään 135 kg.
- Käyttäjän pituus on vähintään 120 cm.
- Käyttäjällä on riittävä jalkojen toimintakyky liikkuaan itsenäisesti.

Laitteen käyttöikä

Tämän laitteen käyttöikä on vähintään kymmenen (10) vuotta. Riippuen käytön intensiteetistä ja latausväleistä, voi akun ja pyörien käyttöikä olla kuitenkin lyhyempi.

Tämä arvioitu käyttöikä perustuu siihen, että ennaltaehkäisevä huolto suoritetaan tämän käyttöohjeen mukaisesti.

Kulumisesta riippuen jotkin osat, kuten akut, pyörät ja verhoiluosat, saattavat vaatia vaihtamista laitteen käyttöiän aikana.

Turvallisuusohjeet

Tärkeitä ohjeita laitteen turvalliseen käyttöön:

VAROITUS

Varmista, että tuolin jarrut ovat päällä, kun nousest tai istuudut. Tämä estää mahdollisten vammojen syntymisen.

VAROITUS

Kun istut tuolissa ja haluat liikkua, varmista, että käsinojat ovat nostettuina ja lukittuina.

VAROITUS

Älä koskaan jarruta tuolia kaltevalla pinnalla ja nojaa taaksepäin kaatumisriskin vuoksi.

HUOMIO

Tämä laite on tarkoitettu sisäkäyttöön. Laitteen käyttäminen ulkona voi aiheuttaa pysyviä vaurioita tuolin pyöriin ja sähkökomponentteihin.

HUOMIO

Älä koskaan käytä teräviä esineitä laitteen lähellä, sillä ne voivat vahingoittaa tuolia.

HUOMIO

Älä koskaan suorita huolto- tai korjaustöitä Adam-työtuolille ilman asianmukaista tietoa tai valtuutusta.

Valmistelut

Ennen laitteen käyttöä huomioi seuraavat valmistelut:

Ensimmäinen käyttökerta

1. Suorita silmämääräinen tarkastus varmistaaksesi, ettei Adam-tuolissa ole kuljetusvaurioita
2. Hävitä pakkausmateriaalit voimassa olevien säädösten mukaisesti.
3. Varmista, että kaikki osat on toimitettu. Voit tarkastaa tämän käyttöohjeen "**Toimitettujen osien kuvaus**" -listasta.
4. Lue tämä käyttöohje huolellisesti.
5. Pura akkulaturi pakkauksesta ja sijoita se helposti muistettavaan paikkaan.
6. Lataa Adam-tuolia vähintään 8 tuntia ennen ensimmäistä käyttökertaa.
7. Testaa kaikki toiminnot **Ennaltaehkäisevän huolto-ohjelman** mukaisesti.
8. Säilytä tämä käyttöohje helposti saatavilla olevassa paikassa.

Ennen jokaista käyttökertaa




1. Tarkista pyörät ja seisontajarru.

HUOMAUTUS


Jos sinulla on kysyttävää tai epävarmuuksia Adam-tuolin käyttöön liittyen, ota yhteyttä jälleenmyyjäsi tai suoraan meihin.

Toimitettujen osien kuvaus

Adam-tuolin pakkaus sisältää:

-  Adam-työtuoli
-  Akkulaturi
-  Käyttöohje

Alla olevassa räjäytyskuvassa näet tuolin yksittäiset osat:

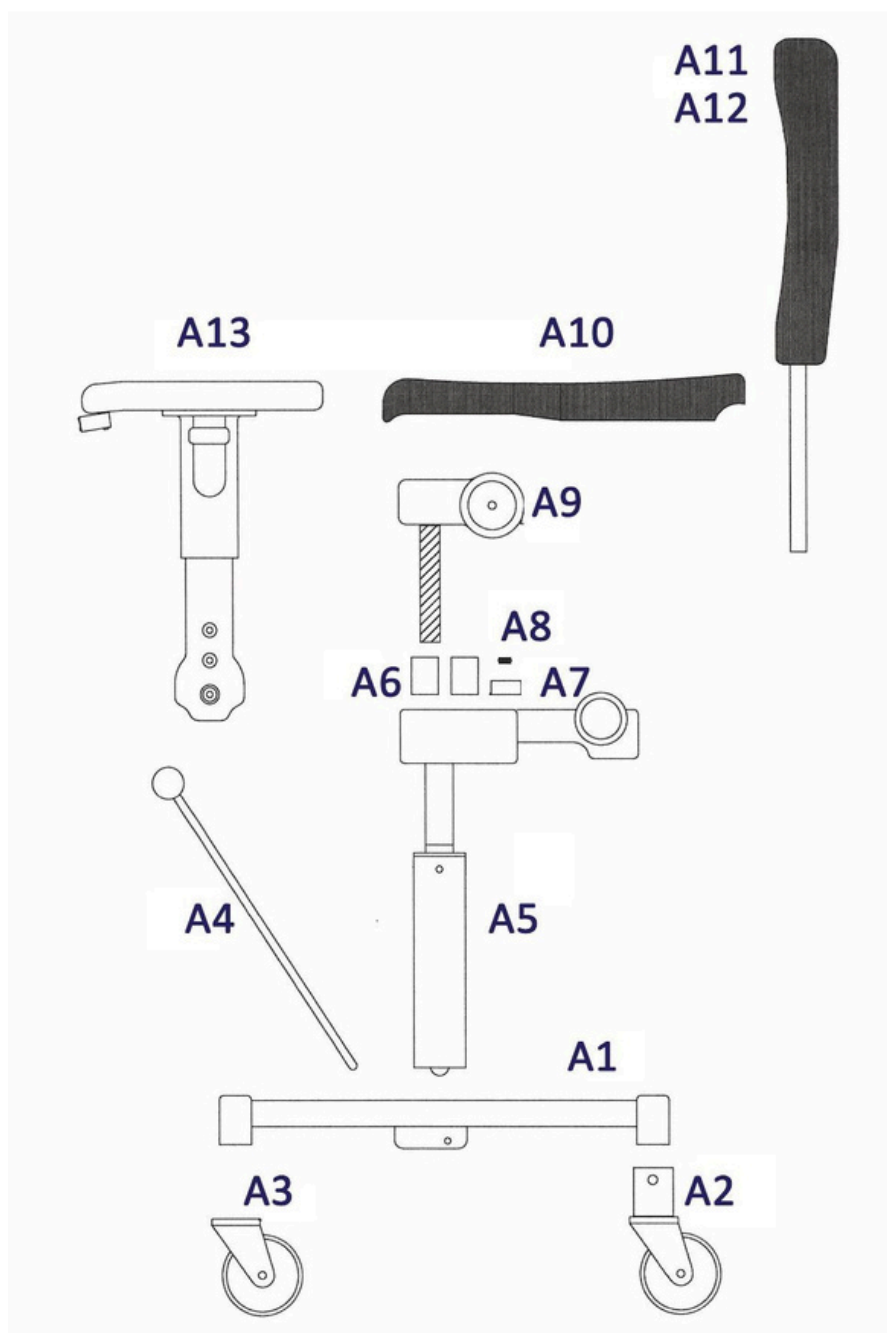

Toimitettujen osien kuvaus

Tuote	Tuotenumero	Kuvaus	Määrä	Huomioitavaa
A1	MSP-MT-MP-00100	Runko	1	
A2	MSP-WH-MP-00141	Pyörä, ei jarrua	2	Ø 100 mm
A3	MSP-WH-MP-00151	Pyörä, jarrullinen	2	Ø 100 mm, keskusjarru
A4	MSP-MT-MP-00110	Jarrukahva	1	Pallonivel
A5	MSP-MT-MP-00150	Nostomoottori	1	Täydellinen kokoontyö
A6	MSP-A-MP-00100	Akku	2	
A7	MSP-EK-MP-00100	Elektroniikkayksikkö	1	
A8	MSP-OV-MP-00100	Power resistance	1	Moottorisuoja
A9	MSP-MO-MP-00100	Korkeudensäätö	1	Täydellinen kokoontyö
A10	MSP-PD-MP-0010X	Istuin	1	X=0 sininen X=1 harmaa
A11	MSP-PD-MP-0011X	Selkänöja MATALA	1	X=0 sininen X=1 harmaa
A12	MSP-PD-MP-0012X	Selkänöja KORKEA	1	X=0 sininen X=1 harmaa
A13	MSP-KIT-MP-00100	Käsituki	2	Täydellinen kokoontyö

Toiminnot

Mekaaninen korkeuden säätö:

Tämä säätö on tarkoitettu Adam-tuolin säätämiseen käyttäjän pituuden mukaan, ja sen tulee suorittaa jälleenmyyjäsi tai toimittajasi ensimmäisen käytön yhteydessä.

1. Tuolin korkeutta voidaan säätää manuaalisesti käyttäjän pituuden mukaan.
2. Löysää M10-pultti (SW 17)
3. Aseta korkeus halutulle tasolle varmistaen, että istuin pysyy vaakatasossa.
4. Kiristä pultti takaisin enintään 90Nm momenttisauvalla.

Sähköinen korkeuden säätö:

Adam-tuolin korkeus on sähköisesti säädettävä. Käytä käsituen alla olevaa säädintä nostaaksesi tai laskeaksesi tuolia.

Paina ylöspäin osoittavaa nuolipainiketta nostaaksesi tuolia.
Paina alaspäin osoittavaa nuolipainiketta laskeaksesi tuolia.

Säädin voidaan sijoittaa joko vasemmalle tai oikealle puolelle tuolia.

Lisävarusteena on saatavilla myös erillinen käsiohjain.



Seisontajarrun käyttö:




Tuoliin on asennettu kahva seisontajarrun käyttöä varten. Kun kahva on etuasennossa, tuolia voi liikuttaa. Kun kahva on taka-asennossa, takapyörät ovat täysin lukkiutuneet ja voit turvallisesti istuutua tuoliin tai nousta siitä pois.

Yhteistyössä jälleenmyyjäsi/toimittajasi kanssa tämä kahva voidaan asentaa joko vasemmalle tai oikealle puolelle.






Toiminnot

Selkänojan kulman säätö:

-  Paina selkänojan alapuolella oleva kahva alas.
-  Aseta selkänoja haluttuun asentoon ja nosta kahva takaisin ylös.
-  Selkänoja on nyt lukittuna uuteen asentoon.



Selkänojan korkeuden säätö:

-  Avaa pyöreä nuppi kiertämällä sitä vastapäivään.
-  Siirrä selkänoja haluttuun korkeuteen.
-  Kiristä pyöreä nuppi kiertämällä sitä myötäpäivään.



Käsitukien leveyden säätö:



Käsitukien väliä voidaan säätää avaamalla istuimen pohjassa olevat pultit kuusiokoloavaimella.

Säädä sitten käsitukien väli halutun levyiseksi.

Kun haluttu leveys on saavutettu, kiristä pultit kuusiokoloavaimella.



Käsitukien korkeuden säätö:

-  Säädä käsitukien korkeutta vetämällä sivulla oleva kahva ylös.
-  Aseta käsitet haluttuun korkeuteen ja päästä irti kahvasta.



Toiminnot

Käsitukien taittaminen pois tieltä:

Adam-tuolin käsituet voidaan taittaa pois tieltä, jotta siirtyminen sivuttaissuunnassa on helpompaa. Nosta ensin käsituki ylös ja taita se sitten taaksepäin.



Istuutuminen ja nouseminen Adam-työtuolilta

Varmista, että seisontajarru on aina päällä ennen kuin istut tuolille tai nouse siltä, kuten käyttöohjeen sivulla 12 on kuvattu.



Jos haluat nousta tuolille sängystä tai sohvalta, voit taittaa käsituet taaksepäin siirtyäksesi tuoliin sivusuunnasta. Katso käsitukien taittaminen edellisestä kohdasta.

Kun olet istuutunut, voit laittaa käsituen takaisin paikoilleen. Se lukittuu paikalleen automaattisesti.

Puhdistus- ja desinfiointiohjeet








Parhaan tuloksen saavuttamiseksi käytä "MSP Medical Chemicals ja MSP Medical disposables" - tuotteita.

Suosittellemme seuraavia tuotteita Adam-tuolillesi:

-  MSP Medical Chemicals All-purpose cleaner (MC-AR-001)
-  MSP Medical Chemicals Disinfectant (MC-DI-001)



Suosittellemme seuraavia siivoustarvikkeita Adam-tuolillesi:

-  MSP Medical Disposables Gloves (MD-HA-LX-001)
-  MSP Medical Disposables Goggles (MD-EY-CL-001)
-  MSP Medical Disposables Spray Bottle (MD-GN-BT-001)
-  MSP Medical Disposables Cleaning Cloth (MD-GN-TW-001)
-  MSP Medical Disposables Towels (MD-GN-TW-002)
-  MSP Medical Disposables Short Soft Brush (MD-GN-BR-001)
-  MSP Medical Disposables Long Soft Brush (MD-GN-BR-002)



Jos sinulla on kysyttävää alla olevasta menettelystä tai jos haluat tilata tuotteita/tarvikkeita, ota yhteyttä meihin tai jälleenmyyjäsi.

VAROITUS

Vaurioiden estämiseksi silmille ja iholle, käytä suojalaseja ja käsineitä koko puhdistuksen ajan. Mikäli tuote joutuu kosketuksiin ihon kanssa, huuhtelee runsaalla vedellä. Jos iholle tai silmiin syntyy ärsytystä, ota yhteys lääkäriin.

Lue aina käyttöohjeet ja kemikaalin turvallisuustiedotteet (MSDS).

VAROITUS

Saastumisen estämiseksi noudata aina tämän käyttöohjeen ohjeita.




HUOMAUTUS

Estääksesi vahingot Adam-tuolille, noudata valmistajan puhdistusohjeita.






Puhdistuksen ja desinfioinnin vaiheet

Adam-tuoli on helppo pitää puhtaana tämän vaiheittaisen ohjeistuksen avulla. Kun seuraat tätä menettelyä huolellisesti, tuoli pysyy aina optimaalisessa hygieenisessä kunnossa.






Vaihe 1 - Näkyvän lian poistaminen

-  Pue käsineet ennen työn aloittamista
-  Poista pöly ja lika Adam-tuolista täyttämällä suihkepullo vedellä ja suihkuttamalla istuin ja runko. Käytä pehmeää harjaa lian poistamiseen. Kuivaa tuoli puhdistusliinalla.
-  Tarkista, onko pyörien ympärillä likaa (esimerkiksi hiuksia tai kertynyttä pölyä) ja poista se käsin.


Vaihe 2 - Yleispuhdistusaineen käyttö

-  Pue suojalasit.
-  Suihkuta MSP Medical Chemicals yleispuhdistusainetta koko tuoliin, pois lukien verhoilu.
-  Puhdista tuoli perusteellisesti käyttäen (pitkää) pehmeää harjaa. Voit käyttää myös puhdistusliinaa.
-  Ota puhdas puhdistusliina ja kostuta se vedellä. Poista puhdistusaineen jäämät. Halutessasi voit suihkuttaa suihkepullosta vettä ja kuivata kuivalla liinalla.
-  Toista yllä oleva vaihe, kunnes tuolissa ei ole puhdistusaineen jäämiä. Liina on hyvä huuhdella useaan kertaan vedellä.

Vaihe 3 – Desinfiointiaineen käyttö

-  Suihkuta MSP Medical Chemicals desinfiointiainetta tuoliin, pois lukien verhoilu.
-  Puhdista tuoli perusteellisesti käyttäen (pitkää) pehmeää harjaa. Voit käyttää myös puhdistusliinaa.
-  Ota puhdas puhdistusliina ja kostuta se vedellä. Poista desinfiointiaineen jäämät. Halutessasi voit suihkuttaa suihkepullosta vettä ja kuivata kuivalla liinalla.
-  Toista yllä oleva vaihe, kunnes tuolissa ei ole desinfiointiaineen jäämiä. Liina on hyvä huuhdella useaan kertaan vedellä.
-  Anna tuolin kuivua.

Vaihe 4 – Loppusiivous

-  Adam-tuolisi on taas valmis käyttöön. Kaikki käytetyt materiaalit on hävitettävä/kierrätettävä voimassa olevien kierrätysääntöjen mukaisesti.

Akun käsittelyohjeet

VAROITUS:

Vammojen ja vaurioiden estämiseksi akkua **EI KOSKAAN** saa:

- Murskata
- Puhkoa
- Avata
- Purkaa

Jos akun kotelo avautuu ja sen sisältö joutuu kosketuksiin ihosi ja/tai vaatteidesi kanssa, huuhtele välittömästi runsaalla vedellä.

Jos akun sisältö joutuu kosketuksiin silmien kanssa, huuhtele ne välittömästi perusteellisesti runsaalla vedellä ja hakeudu lääkärin hoitoon.




Sisällön hengittäminen voi aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. Siirry raikkaaseen ilmaan ja hakeudu lääkärin hoitoon.

HUOMAUTUS

Ylikuumentumisen ja räjähdysriskin estämiseksi älä koskaan altista akkua tulelle tai äärimmäiselle kuumuudelle.

Säilytys

Jos et aio käyttää Adam-tuoliasi pitkään aikaan, huomioi seuraavat seikat:




-  Akut purkautuvat automaattisesti hitaasti, jos niitä ei käytetä. Suosittelemme akkujen lataamista vähintään kerran kuudessa (6) kuukaudessa mukana tulevalla laturilla, jotta akun käyttöikä pitenee.
-  Jos Adam-tuolia ei käytetä, ympäristön lämpötilan tulisi olla välillä 0°C ja +30°C.
-  Parhaan suorituskyvyn saavuttamiseksi älä altista akkuja yli +50°C lämpötiloille.

Adam-tuolin lataaminen

Ennen käyttöä tarkista akun laturi vaurioiden varalta.

Lataa Adam-tuoli ainoastaan mukana toimitetulla akkulaturilla (MSP-C-MP-00100). Ei-alkuperäisen laturin käyttö voi lyhentää akkujen käyttöikää ja/tai vahingoittaa elektroniikkaa.

Mukana toimitettu akkulaturi säätää latausprosessin automaattisesti ja varmistaa aina ihanteellisen latausjakson. Alla vaiheittainen ohje akun lataamiseen:

-  Liitä laturi ensin pistorasiaan.
-  Liitä sitten latauskaapeli latausliitäntään tuolin käsituen alla (kuva). LED-valo syttyy ja palaa punaisena.
-  Kun lataus on valmis, LED-valo muuttuu vihreäksi. Voit nyt irroittaa latauskaapelin latausliitännästä ja pistorasiasta. Säilytä laturi helposti muistettavassa paikassa.



Täysin ladattu akku mahdollistaa Adam-tuolin nostamisen ja laskemisen noin 25 kertaa keskipainoisella käyttäjällä. Kun akku alkaa loppua, tuoli sammuu automaattisesti, jolloin se on ladattava uudelleen yllä kuvatun menettelyn mukaisesti.

Akut perustuvat SLA-tekniikkaan, joka tekee niistä kaasua ja nestettä kestäviä. Tämä mahdollistaa lataamisen missä tahansa. Päivittäisessä käytössä voi olla hyödyllistä ladata tuoli joka ilta.

Mikäli et aio käyttää tuolia pitkään aikaan, aseta tuolin takaosassa oleva kytkin asentoon 0 (nolla) tai jätä tuoli kytkettynä laturiin. Laturi pitää akussa ylläpitovarausta, mikä pitää akun hyvässä kunnossa ja estää sen vaurioitumisen.

Maksimaalisen käyttöiän saavuttamiseksi suositellaan akun lataamista säännöllisin väliajoin, esimerkiksi joka ilta tai joka toinen päivä käytön intensiteetistä riippuen.

Käyttöiän loppuminen

Jos huomaat, että Adam-tuolisi toimii yhä lyhyemmän aikaa ennen akun tyhjenemistä, akkujen vaihto on tarpeen. Ota yhteyttä jälleenmyyjääsi/toimittajaasi tai meihin uuden akun tilaamiseksi. Vanhat akut tulee hävittää voimassa olevien säädösten mukaisesti tai ne voi palauttaa meille.

Ennaltaehkäisevä huolto-ohje

Valitettavasti Adam-tuolisi altistuu kulumiselle. Jos suoritat alla mainitut toimet ilmoitetuin aikaväleihin, voit minimoida kulumista ja hyödyntää tuolin käyttöä optimaalisesti.

Toiminta	Ennen jokaista käyttöä	Joka kuukausi	2 krt/ vuosi	Kerran vuodessa
Tarkista jarrujen toimivuus	X			
Tarkista pyörät	X			
Tarkista korkeuden säätötoiminto		X		
Tarkista laturi ja akku			X	
Tarkista runko			X	
Tarkista verhoilu			X	
Puhdista runko ja pyörät		X		

VAROITUS

Vaurioiden estämiseksi älä koskaan tee muutoksia laitteeseesi äläkä käytä yhteensopimattomia osia.

VAROITUS

Älä koskaan suorita toimenpiteitä Adam-tuolille, jos sinulla ei ole tarvittavaa tietoa tai valtuuksia.








Vuositarkastus

Ennaltaehkäisevän huollon lisäksi Adam-tuolin asianmukainen ja turvallinen toiminta vaatii vuotuisen tarkastuksen.





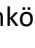

Tarkastus on suoritettava MSP:n tai jälleenmyyjän/toimittajan teknisen palvelun toimesta.

Tarkastuksessa tulee suorittaa ainakin seuraavat toimenpiteet:

Mekaaninen tarkastus:

-  Tarkista, näkykö rungossa tai nostomekanismeissa halkeamia tai muita vaurioita.
-  Tarkista kaikki hitsaukset ja pultti-liitokset.
-  Tarkista suorakulmaisuus ja varmista, ettei rungossa ole vinoutumia.
-  Tarkista mahdolliset kulumisen tai ulkoisten iskujen aiheuttamat vauriot.
-  Tarkista liikkeen säädöt ja pyörät.
-  Tarkista kaikki löysät liitokset ja säädöt.
-  Tarkista korkeudensäätömekanismi, mukaan lukien ruuvien ja mutterien kunto.

Sähköinen tarkastus:

-  Tarkista johdot mahdollisten katkeamien varalta.
-  Tarkista kaikki liitokset.
-  Tarkista sähköiset (turva)toiminnot.
-  Tarkista ohjausjärjestelmä.
-  Tarkista akun kapasiteetti.
-  Tarkista akkulaturi.

Lopuksi on suoritettava maadoitus- ja eristystesti akulle sekä akkulaturille.

Ei-suositeltu käyttö

- Älä käytä Adam-tuolia eläinten tai tavaroiden kuljettamiseen.
- Älä käytä Adam-tuolia hinaamiseen, työntämiseen tai nostamiseen minkäänlaisissa tarkoituksissa.
- Älä käytä Adam-tuolia, jos se on viallinen tai epäilet sen olevan viallinen.
- Adam-tuolissa on erittäin tehokas nostomekaniikka, joten älä koskaan anna lasten leikkiä tuolilla.

Ongelmatilanteiden ratkaisu

Alla on lueteltu joitakin mahdollisia ongelmia ja niihin liittyviä ratkaisuja.

Ongelma	Syy	Ratkaisu
Liikuttelu on jäykkää	Seisontajarru on päällä	Vapauta seisontajarru
Tuoli ei reagoi ohjauslaitteeseen	Suojatoiminto on aktivoitu	Vapauta ohjain, odota 2 sekuntia ja yritä uudelleen
Tuoli ei reagoi ohjauslaitteeseen	Akku on tyhjä	Lataa akku
Tuolia voi säätää vain alaspäin	Akun varaus on vähäinen	Lataa akku

Tekniset tiedot

Yleiset

Max. käyttäjäpaino	135 kg
Tuolin paino	42 kg
Malli ja tyyppi	Adam Triple chair MP-AD-SD-00100
IP-luokka	IP 40
Akun tuotenumero	MSP-A-MP-0100
Akun teknologia	Suljettu lyijyhappo
Akun kapasiteetti	1200mA/h
Akun jännite	12 V/DC
Akkulaturin tuotenumero	MSP-C-MP-00100
Max. käyntiaika	10 % 2 min. ON/18 min. OFF
Max. äänenpaine	60 dB Max.

Käyttö, kuljetus ja säilytys

Lämpötila	+10°C - +40°C käytössä -20°C - +70°C kuljetuksen aikana -20°C - +70°C säilytyksessä
Ilmankosteus	15-95% +20°C:ssa käytössä 10-80% at +20°C:ssa kuljetuksen aikana 10-80% at +20°C:ssa säilytyksessä
Ilmanpaine	800 hPa - 1060 hPa käytössä 500 hPa - 1100 hPa kuljetuksen aikana 500 hPa - 1100 hPa säilytyksessä

Kierrätys

Tämä tuoli on kierrätettävä voimassa olevien säädösten mukaisesti.

Akku	Suljettu lyijyhappovalmisteinen venttiilisäädely akku (SLA/VRLA) Ei saa hävittää, vain kierrätys
Pakkaus	Kierrätettävää pahvia
Adam-työtuoli	Sähkö-, metalli- ja muoviosat on eroteltava ja kierrätettävä voimassa olevien säädösten mukaisesti.

Mitat ja säädöt

Istuinkorkeus	Min. 42 cm Max. 74 cm
Sähköinen korkeudensäätö	200 mm
Mekaaninen korkeudensäätö	120 mm
Istuinsyvyys	46 cm
Istuinleveys	46 cm
Selkänöjan korkeus	40 cm low back 50 cm high back
Selkänöjan kulmansäätö	75-120°
Pyörien halkaisija	100 mm
Käsitukien korkeudensäätö	17-25 cm istuimesta mitattuna. Voidaan taittaa taakse sivuttaissiirtymistä varten.
Käsitukien pituudensäätö	Ei säädettävissä
Leveys käsitukien välillä	38-65 cm
Käyttäjän maksimipaino	135 kg




Adam alimmassa
ja ylimmässä
asennossa

Merkinnät

Sarjanumerokilpi:

Käytä sarjanumeroa ottaessasi yhteyttä tekniseen tukeemme tai tilatessasi varaosia.

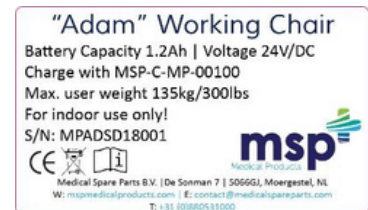







Säätimen merkinnät:

Merkinnät korkeudensäädölle sekä laturin liitännälle.



Varaosat ja lisävarusteet

Osa	Tuotenumero	Kuvaus	From s/n	To s/n	Määrä	Huom.
A1	MSP-MT-MP-00100	Runko	All	All	1	
A2	MSP-WH-MP-00100	Pyörä, ei jarrullinen		24602	2	Ø 100 mm
	MSP-WH-MP-00141	Tuplapyörä, ei jarrullinen	24603			Ø 100 mm
A3	MSP-WH-MP-00110	Pyörä, jarrullinen		24602	2	Ø 100 mm,
	MSP-WH-MP-00151	Tuplapyörä, jarrullinen	24603			keskusjarru
A4	MSP-MT-MP-00110	Jarrukahva	All	All	1	Pallonivel
A5	MSP-MT-MP-00150	Nostomoottori	All	All	1	Täydellinen kokoontulo
A6	MSP-A-MP-00100	Akku	All	All	2	
A7	MSP-EK-MP-00100	Elektroniikkayksikkö	All	All	1	
A8	MSP-OV-MP-00100	Power resistance	All	All	1	Moottorisuoja
A9	MSP-MO-MP-00100	Korkeudensäätö	All	All	1	Täydellinen kokoontulo
A10	MSP-PD-MP-0010X	Istuin	All	All	1	X=0 sininen X=1 harmaa
A11	MSP-PD-MP-0011X	Selkänöja MATALA	All	All	1	X=0 sininen X=1 harmaa
A12	MSP-PD-MP-0012X	Selkänöja KORKEA	All	All	1	X=0 sininen X=1 harmaa
A13	MSP-PD-MP-00130	Käsituki	All	All	2	Täydellinen kokoontulo

-  Osa: viittaa osanumeroon räjähdyskuvassa sivulla 7
-  Tuotenumero: käytä tätä numeroa tilatessasi
-  Kuvaus: lyhyt selitys tuotteesta
-  From s /n | to s /n: näyttää ensimmäisen ja viimeisen sarjanumeron, johon tämä tuote on soveltuva
-  Määrä: ilmaisee kuinka monta kappaletta käytetään laitteessa
-  Huom: mahdolliset huomautukset osasta

Vaatimustenmukaisuustodistus





EG-Declaration of Conformity

(according to the medical device directive MDR EU 2017/745)

We, MSP Medical Products B.V.
De Sonman 7
5066 GJ Moergestel
The Netherlands

Hereby declare that: Electrically adjustable working chair
Brandname "MSP Medical products"
Adam

Types : (Further referred to as working chair)
With serial numbers MPADSD***** (* has a value between 0-9)

- Is compliant with Regulation MDR EU 2017/745 (Medical Devices Regulation) and is classified as Class 1
- The Working chair has been safety tested according to:
 -  EN 10535
 -  EN 12182
 -  EN 60601-1
 -  Bio compatibility ISO 10993
- The Working chair is EMC tested and complies with requirements in accordance with:
 - o Emission EN 60601-1-2 (2007) + AC (2010)
 - o Emission EN 61000-3-2 (2006) + A1 (2009) + A2 (2009)
 - o Emission EN 61000-3-3 (2008)
 - o Immunity EN 60601-1-2 (2007) + AC (2010)
- The internal power source is safety tested according to IEC60601-1, ANSI/AAMI ES60601-1, CAN/CSA-22.2 No 60601-1, IEC62133, UL2054.

MSP Medical Products bv is not aware of any electromagnetic influences between the Working chair and other electrical products..

Technical file compiled by L.J.M.G. Dhanpat.

The Netherlands, Moergestel, 01-10-2024



L.J.M.G. Dhanpat
Medical Spare Parts B.V.

