



**CARELINE**



## KÄYTTÖOHJE CARELINE MOVER

Art. No. 2121 – CARELINE MOVER



Rev. 10.10.2013

## **Johdanto**

Kiitos kun valitsit Careline tuotteen. Kaikki tämän tuotteen ominaisuudet on suunniteltu teknisesti turvallisiksi ja optimoitu yksinkertaista ja suoraviivaista käyttöä varten. Jos sinulla on kysyttävää tai sinulla on ongelmia, joita ei ole käsitelty käyttöohjeessa, ota yhteyttä Careline-huoltokumppaniin tai käy Internetissä osoitteessa [www.faaborg-rehab.dk](http://www.faaborg-rehab.dk)

## **Turvallisuusohjeet**

Ennen Careline MOVERin käyttöönottoa, lue huolellisesti käyttöohjeessa olevat tiedot. Ne sisältävät tärkeitä ohjeita MOVER-laitteen asianmukaisesta käytöstä ja ylläpidosta. Valmistaja ei ole vastuussa vaurioista, jotka johtuvat seuraavien ohjeiden noudattamatta jättämisestä:

## **Käyttötarkoitus**

Helppokäyttöinen ja helposti puhdistettava, alumiini- ja teräsrunkoinen MOVER aktivoi ja tukee henkilöitä, joilla on heikentyneet voimat jaloissa tai tasapaino-ongelmia ja helpottaa siirtymisiä tuolin ja pyörätuolin ja WC:n ja vuoteen välillä.

## **CE-merkintä**

Tuote on CE merkitty ja täyttää EU:n lääkinnällisiä laitteita koskevat direktiivit: No. 225 11/03/ 2011 ja 93/42/EEC of 14/07/1993

## **Takuu ja vastuut**

Jos CARELINE:n vastuulla olevassa Careline MOVER -laitetta vastaanotettaessa ilmenee vika tai vaurio, CARELINE:lla on oikeus joko korjata vika tai toimittaa vaihtotuote. Vaihdetut osat ovat CARELINE:n omaisuutta. Jos viankorjaus tai vaihtaminen ei onnistu, lakisääteiset määräykset ovat voimassa.

Takuuaika on kaksi (2) vuotta, ostopäivästä lukien. Säilytä kuitti ostotodistuksena. Jos MOVER vaatii huoltoa, ota yhteyttä jälleenmyyjääsi tai CARELINE-asiakaspalveluun.

Valmistaja ei ole vastuussa mistään seuraavista syistä aiheutuneista vaurioista: Sopimattomasta tai epäasianmukaisesta varastoinnista tai käytöstä, omistajan tai kolmansien osapuolten virheellisestä asennuksesta tai käyttöönotosta, luonnollisesta kulumisesta, muutoksista tai väärinkäytöksistä, virheellisestä tai huolimattomasta käsittelystä, liikkakäytöstä tai kemikaaleista, paitsi jos vaurio johtuu CARELINE:n laiminlyönnistä.

# Tuotteen osat

Kahvat

Polvi-  
tuki

Istuin-  
tuet

Seisonta-  
alusta

Jarrulliset pyörät

Jarruttomat pyörät



## Tekniset tiedot

Leveys:	575 mm
Pituus:	860 mm
Korkeus:	1060 mm
Paino ilman pakkausta:	19,6 kg
Max.kuormitus:	150 kg

### **MOVERin käyttö:**

Käännä istuintuet sivuun ja asettele potilaan jalat seisonta-alustalle, samalla potilas voi tarttua suorasta otetangosta.

Tämän jälkeen käyttäjän tulee nojata hieman eteenpäin ja vetää itsensä seisoma-asentoon.

Sitten avustaja kääntää istuintuet alas ja käyttäjä voi istuutua istuintuille ja siirtää pyörätuolille, WC:hen tai vuoteelle.

Siirrä potilasta vaihe vaiheelta kuvien osoittamalla tavalla:



## **VAROITUS**

Muista lukita jarrut ennen kuin siirrät potilasta siirtolaitteeseen.



### **Hoito- ja pesuohjeet**

Polvi- ja istuintuet on valmistettu helppohoitoisesta keinoahka materiaalista - komposiittinahasta, joka testattu standardin DIN 54020 mukaisesti. Tällainen pinnoite voidaan pyyhkiä kuivalla tai kostealla liinalla; tarvittaessa voidaan käyttää myös, mietoa pesuainetta, mutta se tulee pyyhkiä heti käytön jälkeen (tahrat on poistettava mahdollisimman pian materiaaliin imeytymisen estämiseksi). Lopuksi materiaali tulee puhdistaa lämpimällä ja puhtaalla vedellä.

Vaikea lika voidaan poistaa alkoholilla kostutetulla kankaalla pyyhkimällä (kankaan ei tule olla märkä). Rasvoja, öljyjä, liuottimia (kuten asetonia) tai hankaavia puhdistusaineita ei tule käyttää.

### **Huolto ja määräaikaistarkistus**

Huolto ja tekninen määräaikaistarkistus tulisi suorittaa kerran vuodessa.

### **Korjaus, huolto ja varaosat**

Teknisissä ongelmissa, ota yhteyttä jälleemyyjään tai valmistajaan:

Jälleenynti Suomessa:  
Camp Mobility  
Patamäenkatu 5, 33900 Tampere  
Puh. + 358 (0)9 350 76 310  
E-mail: [info@campmobility.fi](mailto:info@campmobility.fi) [www.campmobility.fi](http://www.campmobility.fi)

Valmistaja: Faaborg Rehab Technic  
Smedemestervej 9, DK-5600 Faaborg.  
Tlf. + 45 70 20 55 53  
E-mail: [fr@faaborg-rehab.dk](mailto:fr@faaborg-rehab.dk) [www.faaborg-rehab.dk](http://www.faaborg-rehab.dk)

