



## Huolto / Kunnossapito

### Yomper

#### Pesuohjeet

##### **Huom!**

Sähkö- ja elektroniikkakomponentit eivät saa joutua kosketuksiin veden kanssa.  
Älä käytä painepesuria tai höyrypuhdistinta!

#### Puhdistaminen

Puhdista Yomper **kerran kuukaudessa** tai tarvittaessa.

- Sammuta Yomper ja irrota laite pyörätuolista.
- Yomperin voi puhdistaa kätevästi paineilmalla tai kuivalla muoviharjalla.
- Älä käytä syövyttäviä tai hankaavia puhdistusaineita.
- Yomper ja EasyGo ohjainyksikkö voidaan pyyhkiä kostealla liinalla.
- Yomper ja EasyGo ohjainyksikkö **voidaan puhdistaa ja pintapyyhkiä desinfiiovalla puhdistusaineella**
- Pyyhi pehmeällä liinalla ja anna laitteen kuivua ilman vaikutuksesta.

#### Suosittelut huoltotoimenpiteet

Tiheys	Tarkasta	Käyttäjä	Tekninen asentaja
Päivittäin/viikoittain	Lataa Yomper ja EasyGo akku jokaisen käytön jälkeen	X	
Päivittäin/viikoittain	Tarkasta EasyGo ohjaimen ja avustajan ohjaimen kuoret halkeamien/vahingoittumisten varalta (Jos pitää vaihtaa, ota yhteyttä tekniseen asentajaan)	X	
Kerran kk:ssa	Moottori ja renkaat – Tarkista kuluminen (Jos pitää vaihtaa, ota yhteyttä tekniseen asentajaan)	X	
Joka 3. kuukausi	Tarkista, että kiinnitysadapteri on tiukasti kiinni pyörätuolin rungossa	X	
Kerran vuodessa	Yomperin runko / moottori / kiristä ruuvit ja mutterit		X
Kerran vuodessa	Akun kunto		X
Kerran vuodessa	Sähköt, johdot, liittimet, laturi (löysyys ja kuluminen)		X
Kerran vuodessa	Toimintojen tarkistus (Yomper, EasyGo-ohjain ja avustajan ohjain)		X

##### **HUOM!**

##### **Akku**

Jos akkua ei käytetä pitkään aikaan (2-6 kuukautta), se on säilytettävä kuivassa ja viileässä tilassa, jossa lämpötila on 0-30°C. Toimintakyvyn ylläpitämiseksi se tulisi ladata 3-4 kuukauden välein.  
Katso lisätietoja käyttöohjeesta.

Ota kaikissa kysymyksissä yhteyttä valmistajaan Decon Wheel tai jälleenmyyjääsi Camp Mobility.