


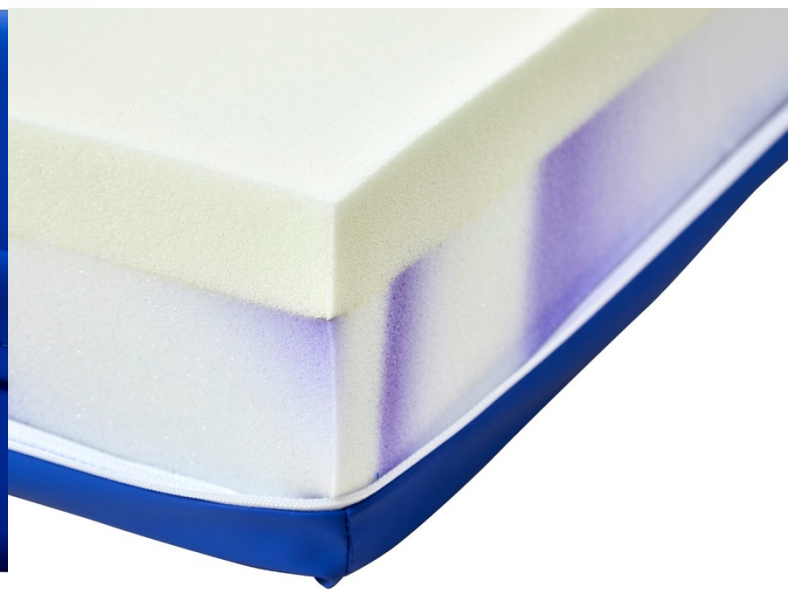

Basis - painehaavapatja

Käyttöopas

Sisällys

Johdanto	3
Tuotekuvaus	4
Pakkauksen purkaminen	5
Puhdistus ja huolto	6
Yleistä	7
Symbolien selitykset	8



TURVALLISUUSOHJEET JA KÄYTÖN VASTA-AIHEET



Perehdy käyttöoppaaseen ennen tuotteen käyttöä



Patjaa saa käyttää vain tässä oppaassa kuvattuun tarkoitukseen. Älä yhdistä patjaan tai käytä sen kokoamisessa tai korjaamisessa muita kuin tässä oppaassa tai ZiboCaren muissa aineistoissa kuvattuja osia, lisävarusteita tai varaosia.



PATJAA EI TULE KÄYTTÄÄ AINOANA HOITONA. Potilaan asentoa tulee vaihtaa säännöllisesti siihen laaditun aikataulun mukaan.



PATJAA EI SAA KÄYTTÄÄ kuumien pintojen tai syttymislähteiden, kuten avotulen, palavien savukkeiden ja kuumien valaisimien, läheisyydessä tai yhteydessä. Vaikka tuote on palotestattu, se voi vaurioitua joutuessaan kosketuksiin palon lähteiden kanssa.



Sijoita patja ja käytä sitä niin, ettei se voi joutua puristuksiin tai vaurioitua. HUOM. Kiinnitä erityistä huomiota siihen, ettei patja jää sängyn laitojen väliin.



Varmista aina, että käytössä on oikean kokoinen patja.



Sängyn käyttö: Huomioi, että päätyä nostettaessa patjan keskiosaan kohdistuu lisäpainetta. Tätä voidaan vähentää nostamalla sängyn jalkaosaa.



Hygieniasuojus on vettähylyvä ja ilmatiivis mutta läpäisee kosteutta. Varmista, että potilas on asianmukaisessa asennossa tukehtumisriskin välttämiseksi.



Patja on suojattu hygieniasuojalla. Käytä vain yhtä suojusta kerrallaan, jotta kosteuden läpäisevyys ei kärsi.



Jos hygieniasuojuksen päällä käytetään kankaista lakanaa, varmista, että myös se on joustava painevammojen välttämiseksi.



Vältä terävien esineiden käyttöä, sillä ne voivat vaurioittaa hygieniasuojusta.



Patjassa on kaksi kahvaa, jotka on tarkoitettu vain patjan siirtämiseen. Takuu ei kata niiden käyttöä muihin tarkoituksiin.



Patjaa saa käyttää vain oikea puoli ylöspäin. Ylöspäin tuleva puoli on merkitty patjaan selkeästi.

Johdanto



Perehdy aina käyttöoppaaseen ennen tuotteen käyttöä.

Käyttötarkoitus

Patjoja voidaan käyttää kaikentyypisissä hoitoympäristöissä painehaavojen ehkäisemiseksi sekä luokan 0–3 painehaavojen hoidossa.

Potilaan asentoa on suositeltavaa vaihtaa säännöllisesti. Vaihtovälin arvioi hoidosta vastaava henkilöstö potilaan tilan, diagnoosin ja yleiskunnon perusteella.

Kliiniset hyödyt

Patja soveltuu avuksi

- painehaavojen ja muiden paineen tai venymisen aiheuttamien kudосvaurioiden ehkäisyssä ja hoidossa
- kivun lievityksessä
- häiriöttömän unen ja kuntoutumisen edistämisessä
- sairaalahoidon tarpeen minimoimisessa.

Kohderyhmä

Potilaat, joilla on painehaavan riski tai joita hoidetaan painehaavan takia. Käyttäjän paino: 0–150 kg.

Muuta

Patja on tarkoitettu käytettäväksi osana painehaavan hoitosuunnitelmaa. Parhaiden mahdollisten tulosten saavuttamiseksi tuotetta suositellaan käytettäväksi osana hyvin suunniteltua ja järjestelmällistä hoitoa.

Tuotekuvaus

Painehaavojen ehkäisyyn tarkoitettu patjassa on erittäin joustava vaahtomuovinen pohjakerros, joka takaa tarvittavan vakauden potilaita liikuttaessa. Patjan pintakerros on painetta lievittävää viskoelastista erikoisvaahtomuovia. Patjassa yhdistyy siten kaksi painehaavojen ehkäisyssä ja hoidossa hyödyllistä ominaisuutta – korkea laatu ja käyttömukavuus.

Patja on suunniteltu käytettäväksi sängyn makuutasolla muun patjan tilalla.

Patjasta on saatavana seuraavat koot:

Nimi	Luettelonumero	Koko	HMI -numero
Basis	8020014Basis	80x200x14 cm	105759
Basis	8320014Basis	83x200x14 cm	105758
Basis	8520014Basis	85x200x14 cm	112202
Basis	8820014Basis	88x200x14 cm	105760

Jos tarvitset muun kokoista patjaa, ota yhteyttä ZiboCareen.

Lisätietoja saa ZiboCarelta numerosta +45 76 900 407, sähköpostitse osoitteesta post@zibocare.dk sekä verkkosivuilta osoitteesta www.zibocare.dk.

Hygieniasuojukset

Kaikki patjan suojukset ovat hygieniasuojuksia. Ne ovat helppokäyttöisiä ja täyttävät korkeat puhdistus- ja hygieniastandardit. Suojukset ovat kosteutta läpäiseviä, mikä vähentää ihon maseraation riskiä.

Suojus: suojuksessa on suojattu vetoketju 3 sivulla.

Väri: Sininen

Patjan kääntäminen

Patja on suunniteltu käännettäväksi (yläpuoli aina ylöspäin), ja säännöllinen kääntäminen myös pidentää sen käyttöikää. Ylä- ja alaosa on merkitty patjaan ja suojukseen.

Pakkauksen purkaminen

Patjat toimitetaan kierrätettävästä muovista valmistetussa kääreessä.

Tarkasta ensin, että pakkaus on ehjä. Poista muovi ja muu suojamateriaali. Älä käytä avaamisessa teräviä esineitä, sillä ne voivat vahingoittaa hygieniasuojusta.

1. Tarkasta, että patja on suojan sisällä oikein päin.
2. Suorista suojus.

Puhdistus ja huolto

Patja tulee puhdistaa ohjeiden mukaan aina ennen kuin se otetaan käyttöön uudella käyttäjällä. Kysy tarvittaessa lisätietoa terveydenhuollon palveluntarjoajan hygieniavastaavalta tai tuotteen toimittajalta.

HUOM.!

Tarkasta hygieniasuojus jokaisen puhdistuksen yhteydessä. Vaurioitunut suojus tulee korjata tai vaihtaa. Noudata paikallisia hygieniia ja puhdistustuotteita koskevia ohjeita.

Hygieniasuojus ja sisäsuojus



Suojukset voidaan pyyhkiä miedolla puhdistusaineliuoksella tai desinfioida soveltuvalla liuoksella, esimerkiksi alkoholilla (saa sisältää pinta-aktiivisia aineita), 70-prosenttisella isopropyylialkoholilla, hapettavalla liuoksella tai enintään 1-prosenttisellä kloorilla. Jos käytät jotakin muuta puhdistusainetta, varmista, ettei se vahingoita pumpun kotelon muovia.

Uloste- ja veritahrat on poistettava välittömästi kylmällä vedellä. Noudata huolellisesti paikallisia ohjeita ja puhdistusaineiden käyttöohjeita.

Monikerroksisten suojusten kerrokset on erotettava toisistaan ennen pesua. Pese suojukset samanväristen kanssa.



Kloori- ja fenolipohjaiset puhdistusaineet voivat vaurioittaa PU-pintaa, ja niitä tulisi välttää. Klooria käytettäessä suositellaan enintään 1 prosentin liuosta.

Patjat



Hygieniasuojus suojaa vaahtomuovisisusta, joten sisus tarvitsee pestä vain harvoin. Käytä sisuksen puhdistuksessa esimerkiksi suihkutettavaa mietoa pesuaineliuosta ja vettä. Purista ylimääräinen vesi pois hellävaraisesti.

Anna vaahtomuovisuksen kuivua lämpimässä, hyvin ilmastoidussa tilassa, suojassa auringonvalolta. Varmista, että sisus on täysin kuiva ennen kuin otat se takaisin käyttöön. Käytä tarvittaessa mietoa pesuaineliuosta tai desinfioi soveltuvalla liuoksella, esimerkiksi alkoholilla (saa sisältää pinta-aktiivisia aineita), 70-prosenttisella isopropyylialkoholilla, hapettavalla liuoksella tai enintään 1-prosenttisellä klooriliuoksella.

Noudata paikallisia ohjeita sekä puhdistustuotteiden käyttöohjeita.

Pesuohjeet



Yleistä

Tämä patja on luokan I lääkinällinen laite, ja se on CE-merkitty lääkinällisistä laitteista annetun asetuksen 2017/745 mukaisesti.

Säilytys

Säilytä patja kuivassa tilassa tasaisella alustalla, taiteltuna tai rullaksi käärittynä ja vetoketju suljettuna. Varmista, että patja ei säilytyksen aikana altistu iskuille tai kolhuille, jotka voivat vaurioittaa sitä. Vältä säilyttämästä patjaa alttiina suoralle auringonvalolle. Yli kolme kuukautta kestävässä säilytyksessä patjan tulee olla tasaisella alustalla, ei taiteltuna tai käärittynä.

Merkinnät

Patjaan on merkitty sen tuotenimi, valmistuspäivä, luettelonumero, koko, hoito- ja pesuohjeet sekä eränumero.

Takuu

Takuuaika on 2 vuotta (standarditakuu, ei koske tarjouskilpailuja)

Takuu kattaa valmistusvirheet mutta ei normaalia kulumista eikä huolimattomasta käsittelystä tai huollosta johtuvaa heikentymistä tai vaurioita.

Käyttöikä

Tuotteen odotettu käyttöikä on 4 vuotta, minkä ajan paineita lievittävät ominaisuudet säilyvät. Käyttöikä voi olla kuitenkin jopa 10 vuotta, mutta patjaa tulisi tällöin kuitenkin käyttää vain potilailla, joilla ei ole välitöntä painehaavojen riskiä. Päällinen kestää normaalissa päivittäisessä käytössä 2 vuotta.

Huolto

Patja ei edellytä muuta kuin tässä oppaassa kuvattua huoltoa.

1.1 Korjaukset

Kysy lisätietoa korjauksista myyjältä.

1.2 Hävittäminen

Kaikki vuodetuotteet voidaan hävittää poltettavana jätteenä. Patjaa ei tarvitse purkaa ennen hävittämistä.

1.3 Palautukset ja reklamaatiot

Reklamaatiot tulee osoittaa tuotteen toimittajalle. Palautukset käsitellään toimittajan ehtojen mukaisesti ja vain pätevien reklamaatioiden osalta. Kuljetuksen aikana tapahtuneista vahingoista on ilmoitettava kuljetusyritykselle.

Onnettomuudet ja vaaratilanteet

Lääkinällisiä laitteita koskevien säännösten mukaan valmistajien ja terveydenhuollon ammattilaisten on ilmoitettava tuotteisiinsa liittyvistä onnettomuuksista ja vaaratilanteista. Kaikista tuotteistamme liittyvistä onnettomuuksista ja vaaratilanteista tulee ilmoittaa välittömästi ZiboCarelle.

Symbolien selitykset



Varoitus



Luettelonro



Valmistaja



Valmistuspäivä



Eränumero



Lääkinnällinen laite



Katso käyttöohjeet



Konepesu 90 asteessa



Varovainen rumpukuivaus



Kemiallinen pesu kielletty



Silitys kielletty



CE-merkitty Lääkinnällisistä laitteista
annetun asetuksen 2017/745 mukaan



Valmistaja:
ZiboCare Denmark ApS
Præstemarksvej 67,
8700 Horsens
Puh.: +45 70 500 407
www.zibocaredenmark.dk
Sähköposti:
post@zibocaredenmark.dk

Ver. 1.00
2024-09

