

SENSOR

Pikaohje (FI)



REHASENSE



Tuotteet:
RRSENCHL600
RRSENCHM500

	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Lukitusmekanismi ja kantokahva 2. Kiinteä istuin 3. Jarrukahvat 4. Korkeudensäätönuppiun 	<p>SENSOR-kävelytelineen avaaminen</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Työnnä istuinta eteen- ja alaspäin avataksesi rungon
	
<ol style="list-style-type: none"> 2. Paina istuinta lujasti varmistaaksesi, että se lukittuu paikalleen. 	<p>SENSOR-kävelytelineen kokoontaittaminen</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Paina rungon etuosassa olevaa punaista nappia
	
<ol style="list-style-type: none"> 2. Nosta istuimen kahvasta ylös- ja taaksepäin taittaaksesi kävelytelineen kasaan. 	<ol style="list-style-type: none"> 3. Integroitu polkaisuputki mahdollistaa kävelytelineen pysymisen pystyasennossa, kun kävelyteline on taitettu kasaan.



SENSORin käsikahvojen korkeudensäätö

1. Löysää korkeudensäätönappia.



SENSORin käsikahvojen korkeudensäätö

2. Liu'uta kahvaa ylös-/alaspäin halutulle korkeudelle.
3. Hyödynnä sisäpuolen merkintöjä sekä putken syvennyksiä korkeuden turvalliseen lukitsemiseen.
4. Kiristä korkeudensäätönappi.



Käsikahvojen suositeltu korkeus

5. Käsikahvan ihanteellinen korkeus on samalla korkeudella kuin käyttäjän ranne, kun hän seisoo kädet hieman koukistettuna kynärpäistä.



Parempi stabiliteetti ja pienempi askel

1. Nosta kiinteää istuinta ylös-/eteenpäin takaa, kunnes se on yläasennossa.
2. Istuin pysyy itsestään tässä asennossa.



3. Käyttäjä pystyy nyt kävellä kehikon sisällä.
4. Tämä mahdollistaa paremman vakauden sekä suuremman ulottuvuuden.



Aktiivinen jarrutus

Purista jarrukahvoja molemmilta puolilta hidastaaksesi ja pysäyttääksesi kävelytelineen liikkuksen.



Käsijarru / pysäköintijarru

1. Paine jarrukahvaa alaspäin, kunnes se lukittuu. Näin kävelyteline ei liiku, vaikka irrottaisit kädet jarrukahvoista.
2. Turvallisuuden vuoksi, pysäköintijarru on aina aktivoitava, kun käyttäjä istuu kävelytelineen istuimella.
3. Turvallisuuden vuoksi, pysäköintijarru on aina aktivoitava, kun käyttäjä haluaa nousta ylös tai istuutua alas käyttäessään kävelytelinettä.