



REHASENSE

SERVER **OS**

Stöd med fyra hjul
Bruksanvisning (SV)



SVENSKA

1 Grundläggande information

Kära användare,

Tack för att du har köpt vår medicinska produkt. I denna bruksanvisning hittar du all viktig information som rör korrekt och säker användning av denna produkt, nedan kallad "stöd".

Innan du använder stödet för första gången bör du läsa igenom och bekanta dig med innehållet i denna bruksanvisning och följa alla våra rekommendationer.

Rehasense förbättrar ständigt sina produkter och förbehåller sig rätten att göra ändringar i produktspecifikationerna utan föregående varning.

Om du är intresserad av våra produkter, vänligen kontakta våra samarbetande medicinska butiker eller kontakta **Rehasense** direkt. Kontaktuppgifter finns på sista sidan i bruksanvisningen.

2 Ändamål, indikationer och kontraindikationer

Indikationer: Stöd har utvecklats som ett förflyttningshjälpmedel för personer som har svårt att stå och gå. Stödet gör det möjligt för dessa personer att återgå till många dagliga aktiviteter.

Det är avsett för personer som på grund av olika medicinska tillstånd behöver stabilt stöd och hjälp med att förflytta sig.

Det är inte tillåtet att använda stödet för något annat ändamål än att hjälpa till att stå, gå och sitta.

Kontraindikationer: Stödet bör inte användas av personer med svåra balansproblem och uttalad svaghet i skelettmuskulaturen som gör att de inte kan stå eller gå utan hjälp. Användningen av ett stöd bör rekommenderas av en sjukgymnast eller läkare

3 Leverans och allmän produktbeskrivning

Stöd levereras i kartongförpackning i hopfällt läge.

Förpackningen innehåller:

- 1 ihopfällt stöd
- 1 bruksanvisning
- 1 lutande ryggstöd

Server OS är ett fällbart stöd med fyra hjul. Produkten är tillverkad av aluminium, vilket gör den lätt och enkel att förvara och transportera. Produkten består av en pulverlackerad, hopfällbar ram av runda aluminiumrör och en hopfällbar kryssram. Den är också utrustad med en tygsits och en shoppingväska som gör det möjligt för användaren att vila och bära småsaker.

4 Krav och säkerhet

Denna bruksanvisning bör läsas av alla personer som använder enheten. Tillverkaren tar inget ansvar för skador som orsakas av att bruksanvisningarna inte följs.



Maximal bärförmåga/användning

- Användarens vikt får inte överstiga 150 kg.
- En vanlig shoppingväska kan rymma upp till 5 kg.
- Stödet är utformat för både inomhus- och utomhusbruk.
- Stödet får inte användas/skjutas i sittande ställning.
- Innan man använder sitsen MÅSTE bromsarna vara i låst läge.



Undvika olyckor


- Använd endast enheten för avsett ändamål.
- Använd endast enheten när den är i funktionsdugligt skick.
- Gör inga egna ändringar på enheten, såvida inte tillverkaren har gett skriftligt tillstånd till detta.
- Var särskilt försiktig när du justerar handtagens höjd så att du inte klämmer fingrarna eller andra delar av kroppen.
- Enheten bör endast användas på ett plant och jämnt underlag.
- Alla hjul ska alltid vara i kontakt med marken. På så sätt bibehålls stabiliteten och olyckor kan undvikas.
- Lås alltid bromsarna när du inte använder gångstödet.

VID ALLVARLIG NÖDSITUATION VID ANVÄNDNING AV PRODUKTEN, RING SÄLJAREN ELLER VÄND DIG DIREKT TILL TILLVERKAREN REHASENSE (kontaktuppgifter i slutet av bruksanvisningen). Omedelbara åtgärder måste vidtas i enlighet med kraven i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/745 om medicintekniska produkter av den 5 april 2017.



Akta fingrarna

OBS: Var extra försiktig när du ser denna skylt. Fingrar eller andra kroppsdelar kan skäras av när enheten fälls ihop, fälls ut eller justeras i höjddled. Var uppmärksam på alla spår och öppningar i enhetens konstruktion.

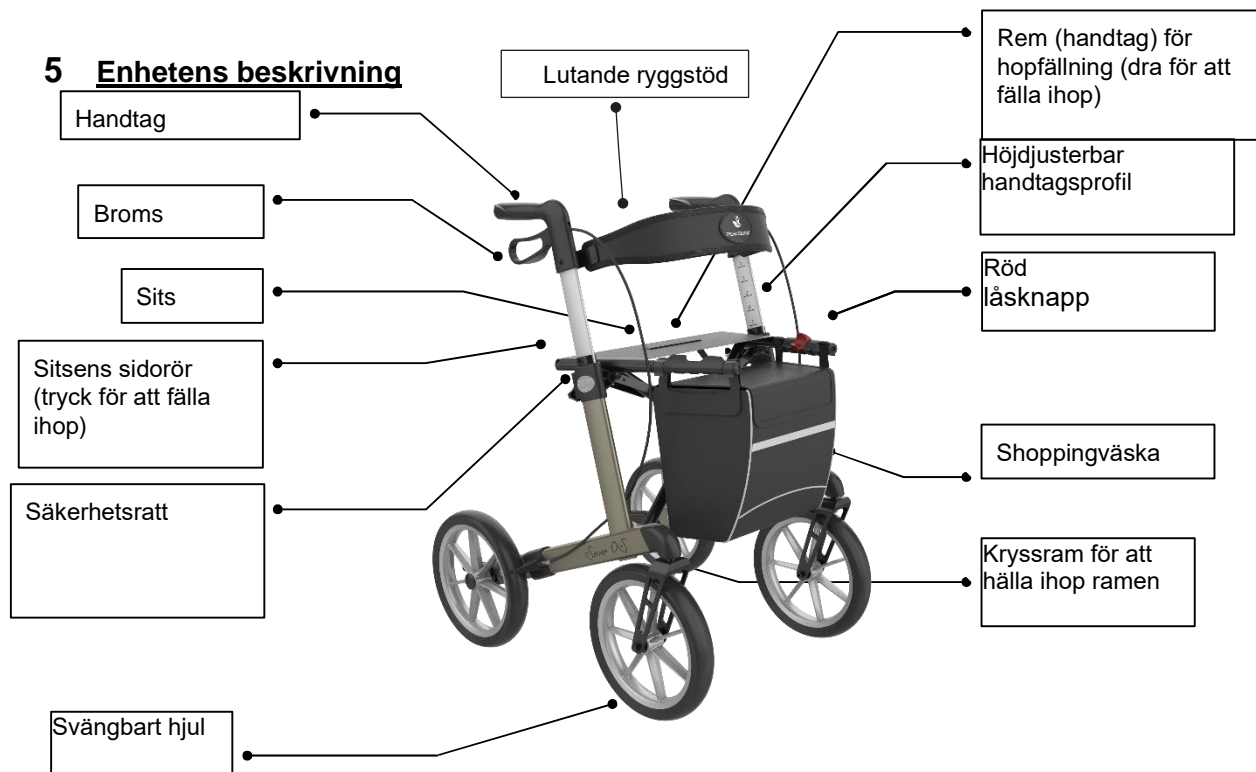

6 Användning

Enheten är utformad för intuitiv användning. Följ gärna nedanstående rekommendationer

Första kontroll

När du har tagit ut enheten ur förpackningen ska du först kontrollera att inget saknas och att alla delar som visas på bilden finns i kartongen. Om du upptäcker att någon del saknas ska du omedelbart kontakta din återförsäljare.

Fälla ut stödet

- För att lossa säkerhetslåset tryck med fingret på den röda knappen som sitter på ett av sitsrören (se bilden).
- Ta tag i båda sitsens sidorör och tryck dem nedåt tills ramen fälls ut och du hör ett "klick".

Stödmekanismen är i utfällt läge.

- För säkerhets skull bör du kontrollera utfällningen genom att försöka fälla ihop ramen.



- *Kontrollera alltid i utfällt läge att säkerhetsbältet sitter fast, vilket gör det lättare att fälla ihop stödet.*
- *Se till att säkerhetsrattarna är ordentligt åtdragna.*
- *Efter ut- eller ihopfällning, kontrollera att höjden på båda handtagen är på samma nivå och att de är stabila. Det är inte tillåtet att använda det om du upptäcker felaktiga delar av stödet.*
- *Kontrollera alltid att alla delar av stödet är i funktionsdugligt skick före användning.*
- *Om ovanstående anvisningar inte följs kan det leda till hälsoskador för användaren.*

Fälla ihop stödet

Dra uppåt i remmen som är fäst vid sitsen tills ramen börjar glida inåt och den röda knappen låses automatiskt. Stödet är ihopfällt.

Justering av handtagens höjd

- Lås upp säkerhetsratten genom att vrida den åt vänster.
- Justera höjden.
- Vrid ratten åt höger.



- *Båda handtagen ska alltid vara inställda på samma höjd. Lämna aldrig enheten med olåsta bromsar.*
- *Rätt placerade handtagen ska befinna sig i användarens höfthöjd*

Användning av handbroms

- För att stoppa stödet, dra bromshandtagen uppåt.
- För att låsa hjulen under en längre tid, tryck ner bromshandtagen tills du hör ett "klick".
- Det är endast i låst bromsläge som användaren kan vända sig om och sätta sig på sätet.
- För att komma igång igen, ställ dig upp, vänd dig om och lås upp bromshandtagen genom att lyfta upp dem.



Ha alltid bromsarna låsta när stödet är i viloläge.

Sätt dig aldrig på sitsen utan att låsa bromsarna!

Luta dig aldrig bakåt när du sitter. Vi rekommenderar att du sätter dig i början av sitsen och är försiktig så att du inte sätter dig "på" väskan.

Sitt rakt upp och håll i handtagen.

Lämna aldrig stödet utan att låsa bromsarna i slutningar eller backar!

7 Rengöring

Allmänt:


- Rengör enheten regelbundet.
- Lätt smuts och damm bör torkas av med en mjuk, våt trasa.
- Större smuts kan avlägsnas med icke-korrosiva kemikalier.
- Använd inte starkt frätande medel eller medel som kan orsaka skador på
- plastdelar, lack.
- Torka av med en mjuk trasa.

Hjul:

- Vi rekommenderar att rengöra hjulen med varmt vatten och en mild vätska.
- Var noga med att smörja lagren med sprayfett med jämna mellanrum eller när hjulen börjar knaka.

8 Exempel på etikett

Produktens märkning i form av etikett är placerad på huvudramen och ser ut som på bilden nedan

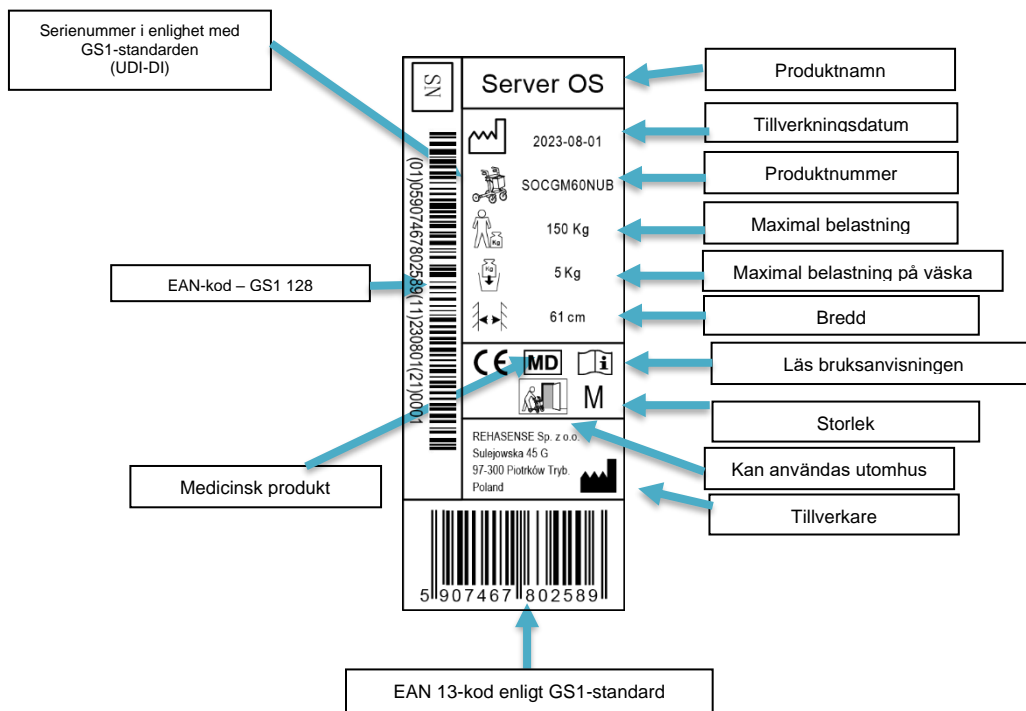

9 Tekniska data

"SERVER OS"	
Maximal användarvikt	150 kg
Maximal belastning på väska	5 kg
Total vikt	9,4 kg (inkl. väska 0,4 kg)
Längd	73 cm
Bredd	Utfälld 65 cm / Hopfälld 26 cm
Sitsbredd	46 cm
Handtagshöjd (justerbar)	81-99 cm
Sitshöjd	60 cm
Hjulstorlek (fram och bak)	285 mm x 45 mm
Höjd hopfälld	94 cm
Bromsar	2 x handbromsar med låsfunktion

10 Transport

Stödet är en lätt hopfällbar produkt som är lämplig för transport. Vi rekommenderar att du transporterar den i hopfällt läge enligt beskrivningen ovan. Under transport bör man se till att produkten står stabilt och inte kan röra sig.

11 Service

Kontrollera alltid att alla delar sitter på plats och är stabila.
Kontrollera att alla skruvar är ordentligt åtdragna.
Byt omedelbart ut alla slitna delar som inte fungerar som de ska.

12 Återanvändning

Stödet är återanvändbart. Den måste genomgå en teknisk kontroll av ett auktoriserat servicecenter innan det får lämnas vidare till en annan användare.

Kontrollpunkter:

- Visuell kontroll av ramen
- Säker fastsättning av muttrar och skruvar
- Plastdelarnas skick
- Hjulens och kullagrens skick
- Bromsarnas funktion och skick

När någon av delarna skadas eller går sönder måste den ersättas med en ny. Det rekommenderas att hjulen byts ut i varje enskilt fall. Alla lösa skruvar och muttrar måste dras åt. Produkten måste rengöras och desinficeras noggrant innan den används igen.

Varning! Det är förbjudet att använda stödet om ramen är böjd eller trasig.

Bruksanvisningen måste överlämnas tillsammans med produkten vid varje användarbyte.

13 Garanti

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
När enheten är uttjänt ska den återvinnas och lämnas till ett avfallshanteringsföretag.

14 Garanti

Garantin gäller inte vid felaktig användning av produkten.
Garantin omfattar inte skador som orsakats av felaktig användning, olyckor och/eller normalt slitage.
Alla ändringar av produkten gör att garantin upphör att gälla. Mekaniska skador täcks inte av denna garanti.
För att utföra reparationer under garantiperioden, kontakta din lokala återförsäljare

Kontakta återförsäljaren vid tekniska problem. Du kan också kontakta Rehasense direkt.

Säljare



Tillverkare

Rehasense® Sp.z o.o.
Sulejowska 45 G
97-300 Piotrków Trybunalski
Poland

www.rehasense.com
info@rehasense.com