

Server AF Stabil



REHASENSE

Stålrollator
Bruksanvisning (SV)



CE

more than mobility

SVENSKA

1 Allmän information

Denna bruksanvisning beskriver den medicinska utrustningen och innehåller viktiga riktlinjer för en korrekt och säker användning. Läs igenom bruksanvisningen noggrant innan du använder utrustningen.

Det är extra viktigt att läsa igenom och följa säkerhetskraven.

REHASENSE utvecklar sina produkter kontinuerligt och förbehåller sig rätten att ändra produkternas specifikationer och funktioner utan separat meddelande.

Kontakta din återförsäljare eller **Rehasense** direkt om du har några frågor. Kontaktuppgifterna hittar du på sista sidan i denna bruksanvisning.

2 Avsedd användning, indikationer och kontraindikationer

Avsedd användning: Rollatorn har utvecklats som ett hjälpmedel för personer som har svårt att stå, gå eller sätta sig. Den gör det lättare för dem att stå, gå, vila och klara de flesta vardagliga sysslor och rutiner på egen hand. All annan användning är förbjuden.

Indikationer: Rollatorn är speciellt avsedd för personer som (av olika hälsoskäl) behöver ett stabilt extrastöd när de går.

Kontraindikationer: Rollatorn får inte användas av personer som har allvarliga problem med kroppsbalansen eller som har för lite muskelstyrka för att kunna stå och gå även med extra stöd från en rollator. Patientens behov av och möjlighet att använda en rollator ska alltid bedömas och indikeras av en läkare eller fysioterapeut.

3 Leverans och allmän produktbeskrivning

Rollatorn levereras hopfälld i en låda för enklare transport..

Lådan innehåller:

- ✓ 1 komplett hopfälld rollator, inkl. korg
- ✓ 1 bruksanvisning

Server AF Stabil är en lättviktsrollator med fyra hjul och en hopfällbar A-ram. Den är tillverkad av stål men är ändå lätt att förvara och transportera. Rollatorn är lätt att manövrera, stabil och har justerbara körhandtag som kan anpassas efter användarens längd. Rollatorn har en pulverlackerad fällbar ram av runda stålrör. Den har också en stadig sits av plast och en korg av pulverlackad ståltråd som användaren kan lägga föremål i.

4 Säkerhetsinstruktioner

Se till att alla som använder rollatorn läser igenom denna bruksanvisning. Tillverkaren ansvarar inte för skador på rollatorn och/eller personer som orsakas av att bruksanvisningen inte har följts.



Användningsbegränsningar

- Rollatorn får inte belastas med mer än 150 kg.
- Rollatorns korg får inte belastas med mer än 5 kg. Överbelastning kan påverka rollatorns stabilitet framåt.
- Rollatorn är avsedd att användas inomhus på jämna underlag. Obs! På lutande underlag kan rollatorn vara instabil.
- Rör dig inte med rollatorn när du sitter på sätet.
- Rollatorns parkeringsbromsar MÅSTE alltid låsas innan man sätter sig på sätet.



Undvika olyckor

- Använd rollatorn endast i det avsedda syftet.
- Använd rollatorn endast när den är i tekniskt gott skick.
- Gör inga ändringar i rollatorns konstruktion, såvida du inte har skriftligt medgivande från tillverkaren.
- Var försiktig så att du inte klämmer fingrar eller andra kroppsdelar mellan två rörliga delar när du gör olika justeringar på rollatorn.
- Rollatorn får endast användas på ett stabilt underlag.
- Alla hjul MÅSTE vara i kontakt med golvet HELA TIDEN. Det tryggar god balans och ska förebygga olyckor.
- När rollatorn står still MÅSTE handbromsarna vara låsta.

SKULLE DU RÅKA UT FÖR EN ALLVARLIG OLYCKA SOM HAR SAMBAND MED ROLLATORN KONTAKTA DIN ÅTERFÖRSÄLJARE ELLER REHESENSE DIREKT (se kontaktuppgifterna på sista sidan i denna bruksanvisning). Omedelbara åtgärder ska vidtas enligt Europaparlamentets och -rådets förordning 2017/745 av den 5 april 2017 om medicintekniska produkter.



Mind your fingers

Uppmärksamma denna symbol på rollatorn.

Var försiktig så att du/din assistent inte klämmer fingrar eller andra kroppsdelar mellan produktens delar vid montering, isärtagning eller justering. Var extra försiktig när du gör justeringar. Lägg märke till avståndet mellan produktens delar för att undvika att klämma fingrar eller andra kroppsdelar.

5 Rollatorns delar



6 Användning



Titta på bilden ovan och gå igenom följande steg för att använda och justera rollatorn på bästa sätt:

Första kontroll

- Ta ut rollatorn ur lådan och kontrollera att inget saknas (se bilden ovan). Fortsätt inte montera rollatorn om någon del saknas eller är skadad, utan kontakta din återförsäljare.

Fälla upp rollatorn

- Dra i handtaget i ramens låsmekanism under sitsen för att fälla upp rollatorn.
- Ta tag i båda sitsrören och tryck ned dem samtidigt tills ramens låsmekanism går i lås.
- Försök dra upp sitsrören igen för att fälla ihop ramen. Om det inte går har ramen fällts upp och låsts fast ordentligt. Se bilden på en uppfälld rollator ovan.

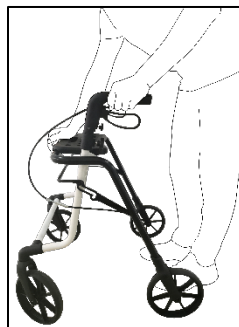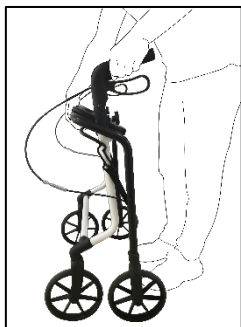

- När du har fällt upp eller monterat delar i rollatorn kom ihåg att dra i sitsens draghandtag för att se till att den är ordentligt låst och att ramen inte rör sig.
- Se alltid till att båda körhandtagens glidstänger är ordentligt fastlåsta i ramen med de två låsvreden och att de inte kan röra sig.
- Kontrollera alltid att tillbehören sitter ordentligt fast och är låsta INNAN du använder dem.
- Underlåtenhet att följa dessa varningar kan leda till personskada.


Fälla ihop rollatorn

- Ta tag i handtaget för ramens låsmekanism under sitsen och dra upp för att fälla ihop rollatorn.



Justera körhandtagens höjd


- Öppna handtagets låsvred.
- Justera handtaget till önskad höjd.
- Dra åt vredet.

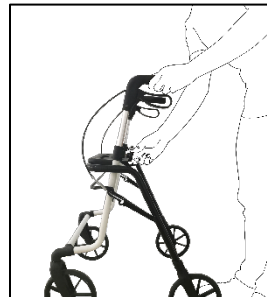

- Båda körhandtagen ska ställas in på samma höjd.
- Körhandtagen ska vara i samma höjd som användarens höfter.
- Låt aldrig rollatorn stå utan bromsarna åtdragna.

Använda handbromsarna

- STANNA ROLLATORN genom att dra upp bromshandtagen mot körhandtagen.
- STÅ STILL MED ROLLATORN genom att hålla bromshandtagen i uppdraget läge.
- BÖRJA RÖRA PÅ DIG genom att släppa bromshandtagen.
De åker ner automatiskt och frigör bromsarna.

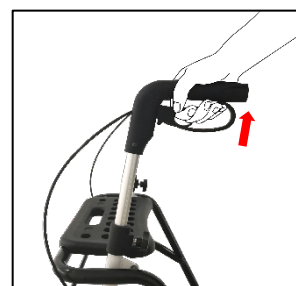

- Håll alltid bromsarna åtdragna när du inte vill röra dig med rollatorn.
- Lämna aldrig rollatorn utan bromsarna åtdragna när någon sitter på den!
- Låt aldrig rollatorn stå i en sluttning utan bromsarna åtdragna.
- Sitt inte för långt bak på rollatorn. Sitt inte (delvis) på inköpskorgen.
- Sitt alltid rakt med underarmarna eller händerna vilande på körhandtagen när du sitter på rollatorn.
- Luta dig aldrig bakåt när du sitter på rollatorn.

Låsa/låsa upp handbromsarna

- Lås bromsarna genom att trycka ned bromshandtagen tills det hörs ett klickljud.
- Lås upp bromsarna genom att dra upp bromshandtagen tills du känner att de lossnar.




- Handbromsarna SKA alltid vara låsta när rollatorn står still.

Använda rollatorn som sits

Du kan använda rollatorn som sits när du vill vila dig en stund. Gör så här:

- Slå först till parkeringsbromsarna.
- Vänd dig och sätt dig på rollatorn med ryggen först.
- Sitt på sitsplattan mellan körhandtagen.
- Du kan luta dig på körhandtagen med underarmarna.
- Sitt inte för långt bak.

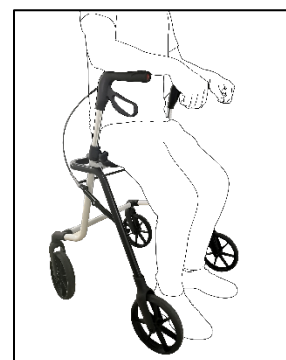

- *Sitt inte för långt bak eller (ens delvis) på inköpskorgen.*
- *Luta inte bakåt.*
- *Sitt aldrig på rollatorn utan att parkeringsbromsarna är tillslagna.*


Styra och vända rollatorn

- Den lätta vikten och de svängbara framhjulen gör rollatorn mycket lätt att styra framåt, bakåt och i sidled. Den är också lätt att vända på stället.
- Ta tag i körhandtagen och skjut rollatorn i önskad riktning.



Reflexer

För att göra rollatorn bättre synlig i mörkret är den försedd med 6 reflexer: 2 sitter på sidorna, 2 baktill och 2 på framramen.

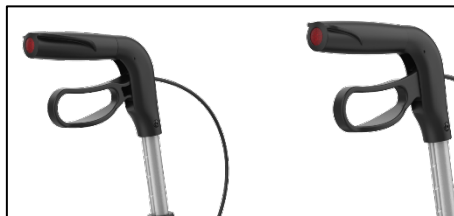

7 Rengöring och desinfektion

Allmänt:

- Rengör rollatorn regelbundet och håll den ren.
- Lättare smuts och damm kan torkas av med en fuktig trasa.
- Större mängder smuts kan torkas av med ett icke-frätande, mildt hushållsrengöringsmedel och varmt vatten.
- Använd inga slipande eller blekmedelsbaserade rengöringsmedel, då det kan skada eller missfärga rollatorn. Torka av delarna med en mjuk trasa.

Hjul:

- Rengör hjulen med varmt vatten och ett mildt hushållsrengöringsmedel. Torka av med en ren trasa.
- Smörj hjulnaven med universalolja regelbundet eller när hjulen börjar gnissla.

Desinfektion:

Om du behöver desinficera rollatorn - kontakta din återförsäljare för att garanteras att det utförs av yrkespersonal. Om du väljer att desinficera rollatorn själv rekommenderar vi att du använder vanliga desinfektionsmedel utan klor eller fenol. Tillverkaren ansvarar inte för skador som härrör från felaktig användning av desinfektionsmedel.

8 Produktetikett

Produktetiketten sitter på ett av ramens nedre rör.

The diagram shows a product label for 'Server AF Stabil' with the following fields and callouts:

- Serienummer enligt standard GS1 128**: Points to the top-left 'SN' field.
- EAN-streckkod enligt GS1 128**: Points to the vertical barcode on the left side.
- EAN 13-streckkod enligt standard GS1**: Points to the horizontal barcode at the bottom.
- Produktnamn**: Points to the 'Server AF Stabil' title.
- Tillverkningsdatum**: Points to the date '2019-11-20'.
- Artikelnummer**: Points to the code 'RRSAFWHL11'.
- Högsta brukarvikt**: Points to the weight '130 Kg'.
- Högsta belastning för inköpskorg**: Points to the weight '5 Kg'.
- Produktsens bredd**: Points to the dimension '64.5 cm'.
- Produktstorlek**: Points to the 'CE' mark and the 'L' symbol.
- Lämplig för utomhusbruk**: Points to the outdoor use icon.

Manufacturer information: REHASENSE Sp. z o.o., Sulejowska 45 G, 97-300 Piotrków Tryb., Poland.

9 Tekniska data

Server AF Stabil, stålrollator	
Högsta belastning	130 kg
Högsta belastning för inköpskorg	5 kg
Totalvikt inkl. tillbehör	8,71 kg & bricka (0,38kg) & käpphållare (0,075kg)
Längd	66 cm
Bredd	Uppfälld 64,5 cm / hopfälld 40,5 cm
Sitsbredd	44.5 cm
Körhandtagens höjd (justerbar)	77–99 cm
Sitshöjd	60 cm
Bromsar	2 x handbroms med låsmekanism funktion

10 Transport

Rollatorn är enkel att fälla ihop och därför lämplig att transportera. Om rollatorn ska transporteras bör den först fällas ihop enligt anvisningarna ovan. Rollatorn ska transporteras så att den förblir stabil och ingen risk för plötsliga och farliga rörelser uppstår.

11 Underhåll

Kontrollera rollatorns skick regelbundet.

- Se till att samtliga delar sitter fast ordentligt HELA tiden.
- Kontrollera att alla skruvar är åtdragna. Dra åt dem vid behov.
- Byt ut trasiga, skadade och slitna delar omedelbart.
- Kontrollera att båda bromshandtagen och bromsarna fungerar som de ska.

Skulle du upptäcka synliga skador på rollatorn - lämna in den till din återförsäljare för kontroll och service. Vi rekommenderar att du låter besiktiga rollatorn minst en gång om året.

12 Återanvändning

Denna rollator kan återanvändas. Innan den överlämnas till nästa användare måste den inspekteras av kvalificerad yrkespersonal hos återförsäljaren.

Följande saker måste kontrolleras vid inspektionen:

- strukturens rigiditet
- att muttrarna och bultarna är åtdragna
- textildelarnas skick
- hjulens och kullagens skick
- bromsarnas effektivitet och skick.

Om någon av ovan nämnda delar är skadad eller trasig måste den bytas ut. Vi rekommenderar att hjulen byts ut vid återanvändning. Alla lösa bultar och muttrar måste dras åt. Rollatorn måste rengöras noggrant och desinficeras innan den återanvänds.

WARNING! Det är förbjudet att återanvända rollatorn om ramen är böjd eller trasig.

Bruksanvisningen måste medfölja rollatorn vid varje ägarbyte.

13 Kassering

Kassering av rollatorn ska ske i enlighet med lokala och statliga föreskrifter. Kontakta din lokala återvinningscentral eller din återförsäljare för råd om bortskaffning av rollatorns förpackning och metall-, plast och andra komponenter.

14 Garanti...

Rollatorerna från REHASENSE kommer med 8 års garanti.

Garantin börjar gälla den dag du köper rollatorn. Garantin gäller endast om produkten används enligt bruksanvisningen.

Rollatorhjul anses vara förslitningsdelar och har en garanti på 2 år.

Garantin täcker inte skador som orsakas av felaktig användning eller olyckshändelse.

Vi tackar dig för ditt förtroende och önskar dig mycket nöje med din rollator.



REHASENSE

För tekniska problem kontakta din återförsäljare. Du kan också vända dig direkt till Rehasense®.

Import och distribution i Finland:

Camp Scandinavia / Camp Mobility:
Patamäenkatu 5,
33900 Tampere,
Finland
Asiakaspalvelu: 09 350 76 310
info@campmobility.fi
Varaosat: 09 350 76 312
varaosat@campmobility.fi
www.campmobility.fi

Rehasense® Sp.z o.o.

Sulejowska 45 G
97-300 Piotrków Trybunalski
Polen
www.rehasense.com
info@rehasense.com