

VIKING

Käyttöohje (FI)



1. Yleistä

Käyttäjälle

Tämä käyttöopas sisältää apuvälineen kuvauksen ja ohjeet, joita noudattamalla varmistetaan apuvälineen turvallinen ja asianmukainen käyttö. Lue käyttöohje huolellisesti. Erityisen tärkeää on lukea turvallisuusvaatimukset ja noudattaa niitä.

REHASENSE® tekee jatkuvaa tuotekehitystä ja pidättää siksi oikeuden muuttaa tuotteiden teknisiä yksityiskohtia ja toimintoja ilman erillistä ilmoitusta.

Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä jälleenmyyjään tai suoraan REHASENSEEN®. Yhteystiedot löytyvät tämän käyttöoppaan viimeiseltä sivulta.

2. Asianmukainen käyttö, suositukset ja kiellot

Asianmukainen käyttö: Kävelyteline eli rollaattori on suunniteltu apuvälineeksi henkilöille, joilla on vaikeuksia seistä tai kävellä ilman tukea. Sen istuimella voi istua. Apuvälineen käyttö muihin tarkoituksiin kuin kävelytelineenä on kielletty. Kävelyteline on suunniteltu sisä- ja ulkokäyttöön ympäristöissä, joissa alusta ei heikennä sen vakautta.

Käyttötarkoitus: Kävelyteline on suunniteltu apuvälineeksi henkilöille, jotka tarvitsevat erilaisten tarpeiden vuoksi tukea kävelemiseen.

Suositus: On suositeltavaa, että pätevä terveydenhuollon ammattilainen arvioi käyttäjän toimintakyvyn ennen laitteen käytön aloittamista.

3. Toimitus & yleiskuvaus

Kävelyteline toimitetaan kokoon taitettuna pahvipakkauksessa kuljetuksen helpottamiseksi.

Toimituksen sisältö:

- ✓ 1 kävelyteline, kokoon taitettuna
- ✓ 1 käyttöohje

VIKING-kävelytelineessä on jauhemaalattu alumiinirunko ja neljä pyörää. Kävelytelineen muotoilun ja lukitusjärjestelmän ansiosta se on helppo taittaa ja lukita pystyasentoon säilyttämistä tai kuljettamista varten. Vakaata kävelytelinettä on helppo ohjata ja työntökahvojen korkeuden säätäminen on yksinkertaista. Kävelytelineessä on erityinen, anatomisesti muotoiltu istuin, jolla on mukava levähtää matkan varrella.

4. Laatustandardit

Viking-kävelyteline täyttää seuraavat eurooppalaiset standardit:

- ISO 11199-2:2021
- EU-asetus 2017/745 (MDR)

5. Turvallisuusvaatimukset

Varmista, että kaikki kävelytelineen käyttäjät lukevat tämän käyttöoppaan.



HUOM!


- Käyttäjän paino ei saa olla yli 150 kg.
- Kävelytelineen etulaukun kuormitus ei saa olla yli 5 kg.
- Kävelyteline soveltuu parhaiten tasaisille alustoille.

- Kävelytelinettä ei ole tarkoitettu liikuteltavaksi istuen.
- Pidä seisontajarrut päällä aina, kun kävelytelinettä ei käytetä.



TÄRKEÄÄ!

- Käytä kävelytelinettä ainoastaan sen suunniteltuun käyttötarkoitukseen.
- Käytä kävelytelinettä vain, kun se on teknisesti hyvässä kunnossa.
- Rakenteellisten muutosten tekeminen kävelytelineeseen on sallittua ainoastaan jälleenmyyjän kirjallisella luvalla.
- Huomioi, että kehonosat voivat joutua puristuksiin kävelytelinen liikkuvien osien väliin.
- Kävelytelinettä saa käyttää vain vakailta alustoilla.

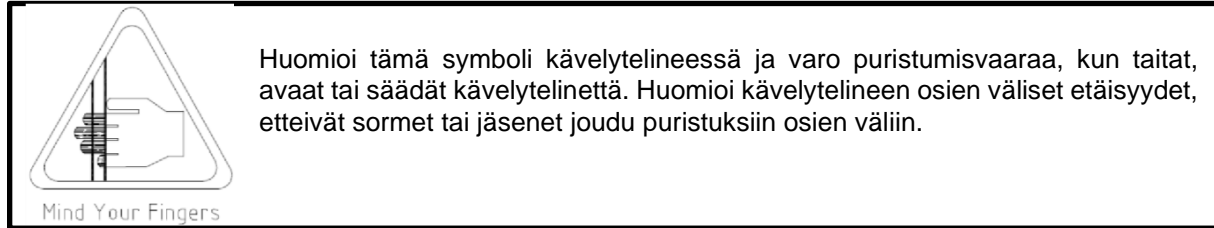

MIKÄLI LAITTEEN KÄYTÖN YHTEYDESSÄ TAPAHTUU VAKAVA TAPATURMA, OTA VÄLITTÖMÄSTI YHTEYTTÄ JÄLLEENMYYJÄÄN TAI REHASENSEEN (yhteystiedot ovat tämän käyttöoppaan lopussa). Tällaisia välittömiä toimia edellytetään 5.4.2017 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2017/745 koskien lääkinnällisistä laitteita.

6. Kävelytelineen osat



Kokotaulukko

Malli	Käyttäjän suositeltu pituus	Istuinkorkeus	Työntökahvojen korkeus
Viking M	135–170 cm	55 cm	66–86 cm
Viking L	150–200 cm	62 cm	74–102 cm

7. Käyttö

Toimituksen tarkistaminen

Purettuasi kävelytelineen pakkauksesta tarkista, että kaikki toimitukseen kuuluvat osat ja tilatut lisävarusteet ovat mukana.

Toiminnan tarkistaminen

- Ennen kävelytelineen käyttöönottoa tarkista, että pyöriä kiinnittävät pultit ovat kunnolla kiinni ja että kävelyteline on vakaa.
- Tarkista jarrujen ja seisontajarrujen toiminta.

Kävelytelineen avaaminen

- Aseta kävelyteline pystyasentoon pyörät alustalla.
- Avaa lukitus painamalla punaista painiketta.
- Avaa runko ja paina istuinputkia alaspäin, kunnes kävelyteline on kokonaan auki.
- Nyt kävelyteline on lukittunut auki.



Kävelytelineen taittaminen

- Ennen kuin taitat kävelytelineen, vedä istuimen keskellä olevasta remmistä ylös.
- Taita runko ja paina putket yhteen, niin lukitusmekanismi aktivoituu.

Työntökahvojen korkeuden säätäminen

- Löysää työntökahvan alapuolella olevaa kierrettävää säätönuppia.
- Säädä kahvat haluamallasi korkeudelle.
- Kiristä nuppi kiertämällä sitä.

Jarrut

- Hidasta tai pysäytä kävelyteline puristamalla jarrukahvaa niin, että se nousee kohti työntökahvaa.
- Vapauta jarru päästämällä irti jarrukahvasta.
- Aktivoi seisontajarru painamalla jarrukahvaa alaspäin, kunnes se lukittuu.
- Vapauta seisontajarru puristamalla jarrukahvaa kevyesti ylöspäin.



Huomio! Seisontajarru on kytkettävä päälle kävelytelineen ollessa pysähdyksissä, jotta minimoidaan kaatumisriski ja vältetään kävelytelineen karkaaminen.

Istuin

- Ennen istumista tarkista, että jarrut on lukittu.
- Istu aina selkä menosuuntaan.



Varoitus! Jarrut on aina lukittava (eli seisontajarrut kytkettävä) ennen istumista ja varmistettava, että ne pysyvät lukittuina, jotta vältetään kaatumiset istuutuessa, istuessa ja istuimelta noustessa.

Lisävarusteet

Kävelytelineeseen on saatavana erilaisia lisävarusteita, kuten selkähihnat, tarjotin, laahausjarru ja yhden käden jarru. Lisätietoja saat jälleenmyyjältä.

8. Puhdistus, desinfiointi & kunnossapito





Yleisohjeet

- Kävelyteline ja lisävarusteet tulee puhdistaa säännöllisesti, jotta ne pysyvät hyvässä kunnossa.
- Kevyen lian ja pölyn voi poistaa kostealla liinalla.
- Sitkeämmän lian voi poistaa miedolla puhdistusaineella ja lämpimällä vedellä.
- Vältä hankaavia ja/tai valkaisevia puhdistusaineita.
- Pyörät voi puhdistaa lämpimällä vedellä ja miedolla puhdistusaineella.
- Kävelyteline lisävarusteineen kestää 10 minuutin pesun enintään 80 °C:ssa pesulinjastossa, suihkukaapissa tai desinfiointikoneessa tai vastaavassa.
- Jos käytät painepesuria, vältä sen suuntaamista suoraan pyörien laakereihin.
- Kävelytelineen lisävarusteineen voi desinfioida pehmeällä liinalla tai sienellä ja desinfiointiaineella, joka sisältää 70–80 % etanolia. Emme suosittele klooria tai fenolia sisältäviä desinfiointiaineita.

- Poista pyörien ja haarukoiden väliin jääneet hiukset ja muut roskat säännöllisesti.
- Liikkuvat osat voi voidella silloin tällöin pyörien kunnossapitämiseksi.

9. Tuotetarra

Tuotetarra sijaitsee yhdessä päärungon alemmista putkista. Se sisältää seuraavat tiedot tuotteesta: nimi, sarjanumero, valmistuspäivämäärä, tuotenumero, käyttäjän enimmäispaino, etulaukun enimmäiskuorma, leveys, kävelytelineen koko ja valmistajan tiedot. Älä poista tarraa tuotteesta.

VIKING (L)  5 907467 819303	 REHASENSE Sp. z o.o. Sulejowska 45 G 97-300 Piotrków Tryb. Poland	2023-09-25  SRSIL600T 150 kg 5 kg 60 cm	HMI NR: 138673
	 (01)05907467817248(11)230925(21)0001		

10. Tekniset tiedot

VIKING	M	L
Kokonaisleveys auki/taitettuna	61 cm / 23 cm	61 cm / 23 cm
Istuinleveys	42 cm	42 cm
Istuinkorkeus	53 cm	62 cm
Työntökahvojen korkeussäätövara	66–86 cm	74–102 cm
Käyttäjän enimmäispaino	150 kg	150 kg
Etulaukun enimmäiskuorma	5 kg	5 kg
Tuotteen paino ilman etulaukkuja	5,9 kg	6,2 kg
Jarrut	2 x lukittavat käsijarrut	
TPE-pyörät (vakiovaruste)	4 kpl 200 mm x 35 mm pyöriä	

11. Vianetsintä

Ongelman kuvaus	Mahdollisia syitä	Ratkaisu
Kävelytelinettä on vaikea työntää tai ohjata.	Pyörien ja haarukoiden välissä on roskaa.	Puhdista pyörien ja haarukoiden välit. Irrota pyörät tarvittaessa. Voitele liikkuvat osat voiteluöljyllä.
Jarrut eivät toimi niin kuin pitäisi tai niissä on puolieroja.	Jarrukengät ovat kuluneet tai jarruja ei ole säädetty oikein.	Kokeile säätää jarruvaijeria tai vaihtaa jarrukengät. Jos se ei ratkaise ongelmaa, ota yhteyttä jälleenmyyjään.
Runko ei lukitu oikein kävelytelinettä avatessa tai taittaessa.	Tarkista, ettei rungon lukitusmekanismi tai vastaanottava osa ole kulunut tai viallinen. Tarkista myös, ettei runko ole vääntynyt.	Vaihda kuluneet tai vialliset osat. Jos se ei ratkaise ongelmaa, ota yhteyttä jälleenmyyjään.

12. Kuljettaminen

Kävelyteline on helppo taittaa kokoon kuljetusta varten. On suositeltavaa taittaa se kokoon yllä olevien ohjeiden mukaisesti kuljetusta varten. Kävelytelinettä tulee kuljettaa niin, että se ei pääse liikkumaan äkillisesti kuljetuksen aikana.

13. Uudelleenkäyttö ja hävittäminen

Kävelytelineen voi siirtää seuraavalle käyttäjälle. Asiantuntevan henkilökunnan on tarkastettava tuote ennen sen luovuttamista toiselle käyttäjälle.

Toiminnallisen tarkastuksen sisältö uudelleenkäytön yhteydessä:

- rungon silmämääräinen tarkistus
- kaikkien muttereiden, pulttien ja liikkuvien osien tarkistus
- muoviosien kunnon tarkistus
- pyörien, haarukoiden ja kuulalaakereiden tarkistus
- jarrujen toiminnan ja kunnon tarkistus

Vaurioituneet tai rikkiäiset osat on vaihdettava. Pyörät vaihdetaan tarvittaessa. Tuote on puhdistettava ja desinfioitava huolellisesti ennen uudelleenkäyttöä.



Huomio! Kävelyteline, jonka runko on vääntynyt, on hävitettävä.

Hävittäminen

Kun kävelyteline ei enää ole käyttökelpoinen, tuote, sen lisävarusteet ja pakkausmateriaalit on hävitettävä asianmukaisesti. Kävelyteline on vietävä jäteasemalle tai keräyspisteeseen kierrätettäväksi.

14. Takuu

- Kävelytelineellä on kahden (2) vuoden takuu valmistusvirheitä vastaan ostohetkestä alkaen, ellei toisin sovita.
- Varaosilla ja lisävarusteilla on yhden (1) vuoden takuu valmistusvirheitä vastaan toimituspäivästä alkaen, ellei toisin sovita.
- Takuu ei kata väärinkäytöstä ja/tai normaalista kulumisesta aiheutuneita vaurioita.
- Käyttöä ja kunnossapitoa koskevia ohjeita on noudatettava.
- Luvattomat muutokset tuotteeseen johtavat takuun raukeamiseen.

15. Odotettava käyttöikä

Tuotteen odotettavissa oleva käyttöikä on kymmenen (10) vuotta, jos sitä käytetään käyttöoppaassa annettujen asianmukaista käyttöä ja kunnossapitoa koskevien ohjeiden mukaisesti. Tuotteen toteutunut käyttöikä voi vaihdella sen mukaan, kuinka tiheässä ja raskaassa käytössä tuote on.

Jos tuotteessa ilmenee teknisiä vikoja, ota yhteyttä jälleenmyyjään. Voit myös olla yhteydessä suoraan Rehasense®:en.

Rehasense®

Valmistaja
Rehasense SP. SOO.
Sulejowska 45g
97-300 Piotrków Trybunalski
Polen

Rehasense Sverige
Polhemsgatan 28
39239 KALMAR
Sweden

www.rehasensesverige.se



REHASENSE