

**VIKING**

**Monterings- och bruksanvisning**  
Bruksanvisning (SE)



VIKING/ 2023

1

CE

## SVENSKA

### 1 Allmänt

Bästa kund!

Denna bruksanvisning beskriver den medicintekniska produkten och innehåller viktiga rekommendationer som säkerställer korrekt och säker användning av produkten. Det är viktigt att läsa denna bruksanvisning noggrant före användning av produkten. Det är särskilt viktigt att bekanta sig med säkerhetskraven och följa dem.

REHASENSE utvecklar kontinuerligt sina produkter och förbehåller sig rätten att ändra produktspecifikationer och egenskaper utan föregående meddelande.

Om du har några frågor kan du vända dig direkt till din REHASENSE-återförsäljare. Kontaktuppgifter finns på sista sidan i bruksanvisningen.

### 2 Ändamål, indikationer och kontraindikationer

**Ändamål:** Rullatorn är utformad för att hjälpa personer med svårigheter att röra sig, till exempel att stå eller gå självständigt. Rullatorn hjälper dessa personer att stå och gå utan svårigheter och att utföra de flesta dagliga sysslor och aktiviteter utan hjälp från andra. Annan användning är förbjuden.

**Indikationer:** Rullatorn är särskilt utformad för personer som på grund av en rad olika hälsoproblem behöver extra, stabilt stöd när de går.

**Kontraindikationer:** Den får inte användas av personer som har svåra balansproblem eller av personer som inte kan stå eller gå på grund av otillräcklig muskelstyrka, även om de har extra stöd av en rullator. Behovet av och möjligheten att använda en rullator måste bedömas av en läkare eller sjukgymnast.

### 3 Leverans och allmän beskrivning

Rullatorn levereras i en kartong och är hopfäld för att underlätta transport.

Innehåll:

- 1 rullator, hopfäld, inklusive sits och väska
- 1 bruksanvisning

Rullatorn "VIKING" har en ram i pulverlackerad aluminium och är utrustad med 4 hjul. Den lätta aluminiumramen gör rullatorn enkel att fälla ihop, förvara och transportera. Den är lättmanövrerad och tillräckligt stabil. Skjuthandtagen kan justeras i höjdlängd. Rullatorn är fabriksmonterad med en anpassad sits och shoppingväska.

### 4 Säkerhetskrav

Se till att denna bruksanvisning läses av varje person som ska använda rullatorn. Tillverkaren ansvarar inte för skador som orsakas av att bruksanvisningen inte lästs och följts.



#### **Begränsningar i användningen**

- Användarens vikt får inte överstiga 150 kg.
- Rullatorväskan får inte belastas med mer än 5 kg.
- Rullatorn är avsedd för användning på plana, jämna ytor.
- Rullatorn får inte skjutas i sittande ställning.
- Innan man sätter sig på sitsen MÅSTE bromsarna vara i låst läge.



#### **Risk för olyckor**


- Använd rullatorn endast för det avsedda ändamålet.

- Använd endast en rullator som är i perfekt skick.
- Gör inga konstruktionsändringar utan skriftligt medgivande från leverantören.
- Under de olika möjliga justeringarna av enheten måste användaren se till att inte klämma fingrar eller andra delar av kroppen mellan enhetens två rörliga delar
- Rullatorn får endast användas på stabila underlag.
- Vid användning **MÅSTE** alla hjul **ALLTID** vara i kontakt med golvet. Detta säkerställer att rullatorn är korrekt balanserad och förhindrar olyckor.
- När rullatorn används i stillastående läge **MÅSTE** handbromsarna vara låsta.



Var försiktig när du ser denna symbol på rullatorn. Fingrar eller andra delar av användarens och/eller assistentens kropp kan komma i kläm när rullatorn fälls ihop, fälls ut eller justeras. Var särskilt försiktig när du justerar rullatorn. Håll ett avstånd mellan rullatorns komponenter för att undvika klämning av fingrar eller andra kroppsdelar.

## 5 Produktbeskrivning

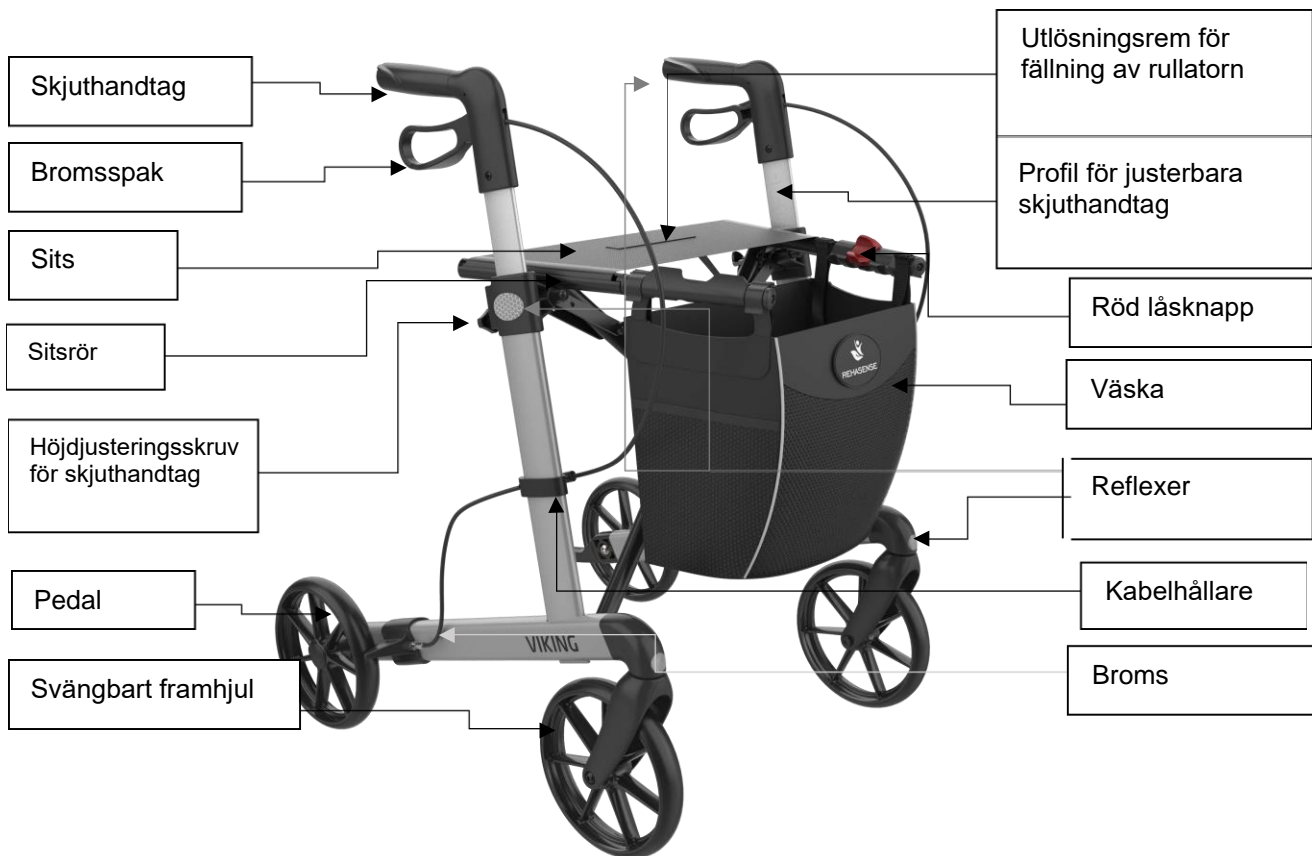

## 6 Användning

### Kontroll efter mottagandet

När du har packat upp rullatorn ska du först kontrollera att inget saknas och att alla delar som visas på ritningen finns med. Om du upptäcker att någon del saknas ska du omedelbart kontakta säljaren.

### Förberedelser

Placera rullatorn med hjulen på golvet. Tryck på den röda knappen och ta tag i rören vid sitsen. Tryck in dem tills du hör att låsmekanismen klickar.

Rullatorn är nu utfälld och säkrad så att den inte kan fällas ihop.

Före användning ska du kontrollera att skruvarna som håller fast hjulen är ordentligt åtdragna och att rullatorn står stadigt och att inga delar rör sig.

Kontrollera också att bromsen fungerar innan du använder rullatorn.



### Hopfällning av rullatorn

För att fälla ihop rullatorn, dra uppåt i remmen mitt på sitsen.

Därefter frigörs låsmekanismen och rullatorn kan fällas ihop.

### Justering av skjuthandtagens höjd

För att justera höjden på skjuthandtagen, lossa på skruven.

Justera sedan handtagen till önskad höjd och dra sedan åt skruven igen.



Kom ihåg att båda handtagen måste ställas in på samma höjd. Korrekt inställda handtag ska vara ungefär i höjd med användarens höfter när denne står med armarna löst nedfällda.

**För att justera höjden på skjuthandtagen** - Lossa de 2 låsknapparna på skjuthandtagen.

- Anpassa höjden.

- Tryck på de 2 knapparna.

### Användning av bromsar

- FÖR ATT STOPPA RULLATORN dra helt enkelt bromsen uppåt mot handtaget.

- FÖR ATT STÅ, håll bromsen i det ÖVRE läget.

- FÖR ATT KÖRA, frigör bromsen. Handtaget sänks automatiskt och bromsen lossas.



- Du **MÅSTE** alltid dra åt bromsen om du inte ska använda rullatorn.
- Lämna aldrig rullatorn utan uppsikt om bromsarna inte är åtdragna!
- Lämna aldrig rullatorn i en sluttning om bromsarna inte är åtdragna!

### Låsning/lossning av bromsar

- För att låsa bromsarna genom tryck bromsspaken ner tills du hör ett "klick" ljud.

- För att lossa bromsarna dra bromsspaken uppåt tills du känner att hjulen kan rulla fritt.



- När rullatorn står **MÅSTE** bromsarna vara låsta.

### Tillbehör

Det finns olika tillbehör till rullatorn (t.ex. ryggstöd, bord, frigöringsbroms, enhandsbroms osv.) För ytterligare information, kontakta din återförsäljare.

## 7 Allmän rengöring


- Rengör rullatorn regelbundet och håll den ren.
- Mindre smuts och damm kan tas bort med en fuktig trasa.
- Större nedsmutsningar kan tas bort med ett mildt rengöringsmedel och varmt vatten.
- Använd inte hårda slipmedel eller blekmedel, som kan skada rullatorn och orsaka missfärgning.
- Torka alltid av med en mjuk trasa efteråt.
- Tål autoklavtvätt vid max 80° i upp till 10 minuter.

### Hjul:

- Rengör hjulen med varmt vatten och ett mildt rengöringsmedel. Torka av med en ren trasa.
- Smörj med universalolja om hjulen börjar gnissla.

## 8 Etikett

Produktetiketten är placerad på ett av de nedre rören i huvudramen. Den innehåller viktig produktinformation som namn, serienummer, tillverkningsdatum, produktnummer, maximal användarvikt, maximal väsklast, rullatorns bredd, storlek och tillverkaruppgifter. Etiketten får inte tas bort från produkten.

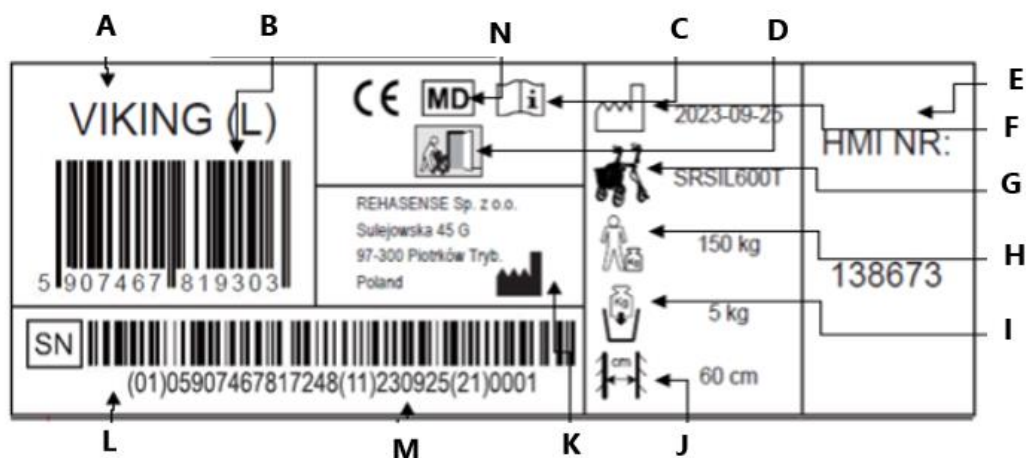

<b>A</b>	Produktens namn och storlek	<b>H</b>	Användarens maximala vikt
<b>B</b>	EAN 13-streckkod enligt GS1 standard	<b>I</b>	Korgens maximala vikt
<b>C</b>	Läs bruksanvisningen	<b>J</b>	Produktens bredd
<b>D</b>	Kan användas utomhus	<b>K</b>	Tillverkare
<b>E</b>	HMI-nummer	<b>L</b>	UDI-DI serienummer
<b>F</b>	Tillverkningsdatum	<b>M</b>	EAN 13-streckkod enligt GS128 standard
<b>G</b>	Produktens nummer	<b>N</b>	Medicinsk utrustning

## 9 Tekniska data:

VIKING	
Total bredd öppen/fälld	60cm / 24cm
Sitsbredd	60 cm
Längd	68 cm
Sitshöjd	L/62 cm - M/55 cm
Skjuthandtagets höjd (justerbar)	L/74–102 cm - M/66–86 cm
Max lastkapacitet	150 kg
Maximal belastning för shoppingväskan	5 kg
Totalvikt utan väska (Large)	6,2 kg & väska 0,3 kg
Totalvikt utan väska (Medium)	5,9 kg & väska 0,3 kg
Bromsar	2 x handbromsar med låsfunktion

## 10 Problemlösning

<i>Problembeskrivning</i>	<i>Möjliga orsaker</i>	<i>Lösning</i>
Rullatorn kan skjutas eller köras med svårighet	Det finns smuts mellan hjulen och gaffeln	Rengör utrymmet mellan hjulet och gaffeln. Alternativt kan du ta bort hjulet. Smörj rörliga delar med fett.
Bromsarna fungerar inte som de ska eller så fungerar den ena bromsen bättre än den andra.	Bromsbackarna är slitna eller bromsarna är inte korrekt justerade.	Försök att justera bromsvajern eller byt ut bromsbackarna. Om detta inte löser problemet, kontakta din återförsäljare.
Sitsen går inte att låsa i rätt läge.	Kontrollera om låsmekanismen snäpper eller om den är skadad. Se efter om något är i vägen eller om något är blockerat.	Kontrollera eller byt ut låsmekanismen. Om detta inte löser problemet, kontakta din återförsäljare.

## 11 Transportbeskrivning

Rullatorn är lätt att fälla ihop och transportera. Om det finns behov av transport rekommenderar vi hopfällning enligt beskrivningen ovan i bruksanvisningen. Rullatorn ska transporteras på ett sådant sätt att den inte rör sig under transporten.

Dess utformning gör att den enkelt kan fällas ut och ihop. Se till att rullatorn står stabilt under transport för att undvika vridning.

## 12 Underhåll

- Se till att alla komponenter i rullatorn är ordentligt åtdragna.
- Kontrollera att alla skruvar är åtdragna. • Om inte, dra åt vid behov.
- Byt omedelbart ut skadade, defekta eller slitna komponenter.

## 13 Återanvändning

Rullatorn kan återanvändas. Innan rullatorn lämnas över till en annan person MÅSTE den kontrolleras av en specialist hos återförsäljaren.

Följande ska kontrolleras:

- Visuellt kontroll av ramen
- Kontrollera att alla muttrar och skruvar är åtdragna
- Plastdelarnas skick
- Hjulets och kullagrens skick
- Bromsarnas funktion och skick

Om någon av komponenterna är skadad eller trasig måste den ersättas med ny. Det rekommenderas att byta ut hjulen när det behövs. Alla lösa skruvar och muttrar måste dras åt. Produkten MÅSTE rengöras och desinficeras noggrant innan den används igen.

**OBS!** Det är förbjudet att använda rullatorn om ramen är böjd eller trasig.

Inkludera alltid bruksanvisningen för en rullator som ska överlämnas till en annan person.

## 14 Återvinning

Rullatorn får inte bortskaffas tillsammans med vanligt avfall. Den måste lämnas till en återvinningscentral för återanvändning eller återvinning.

## 15 Garanti

Garantin gäller inte om produkten används på ett felaktigt sätt.

Garantin täcker inte skador som orsakats av felaktig hantering, olyckor eller normalt slitage.

Alla ändringar av produkten gör att garantin upphör att gälla. Garantin omfattar inte mekaniska skador. Om du behöver en reparation inom garantiperioden, kontakta din lokala återförsäljare

## 16 Förväntad livslängd

Den förväntade livslängden för produkten är tio (10) år, förutsatt att den används i enlighet med de rekommendationer om säkerhet, underhåll och korrekt användning som finns i denna bruksanvisning. Den faktiska livslängden för produkten kan variera beroende på hur ofta och intensivt den

Kontakta återförsäljaren vid tekniska problem. Du kan också kontakta Rehasense direkt.

**Rehasense Sp. z o.o.**  
Sulejowska 45G  
97-300 Piotrków Trybunalski  
Poland

[info@rehasense.com](mailto:info@rehasense.com)  
[www.rehasense.com](http://www.rehasense.com)

**Rehasense Denmark**  
Garmestervej 18b, st. th  
8600 Silkeborg  
[info@rehasense.com](mailto:info@rehasense.com)