



COBI REHAB®
The Positioning Company

KÄYTTÖOHJE

Suihku-/wc-tuoli jalallinen Clean

Vahva ja toiminnallinen suihku- ja wc-tuoli, joka on tarkoitettu bariatrisille käyttäjille.

Clean on tarkoitettu käyttöön hoito- ja palvelukodeissa, laitoksissa ja sairaaloissa.

Käyttäjän maksimipaino 325 kg. Saatavana kahta kokoa: 61 cm ja 71 cm leveät mallit.



Scan the QR-code and find the product on the Danish AssistData.



Cobi Rehab and Cobi Rehab suppliers comply with the UN conventions on child labour and forced labour as well as ILO 029, C132 and C182.

Sisällysluettelo

1. Turvallisuus	3
2. Symbolit	4
3. Käyttö	5
4. Käyttöönotto	5
5. Varastointi	5
6. Yleistä	6
7. Puhdistus ja huolto	6
8. Hävittäminen	6
9. Takuu	7
10. Tekniset tiedot	8
11. Tilaus	8

1. Turvallisuus



VAROITUS

Älä käytä suihku-/wc-tuoli Cleania ilman koulutetun henkilön ohjeistusta tai käyttöohjeiden lukemista. Tuotteen epäsopiva käyttö saattaa johtaa käyttäjän loukkaantumiseen.

Käytettäessä tuotetta henkilöllä, joka painaa yli 325 kg on riski, että tuote vahingoittuu.

Lue käyttöohje tarkasti ennen tuotteen käyttöä. Huomioi erityisesti turvallisuusohjeet.

Cobi Rehab ei ole vastuussa tuotteen tai henkilön vahingoittumisesta, mikä johtuu tuotteen vääränlaisesta asennuksesta tai jos tuotetta käytetään käyttöohjeiden vastaisesti. Ole välittömästi yhteydessä Cobi Rehabiin, jos tuotteesta puuttuu osia tai osat ovat vioittuneet. Älä koskaan käytä omia varaosia!

Cobi Rehab ei ole vastuussa virheistä tai vaaratilanteista, jotka tapahtuvat valtuuttoman korjauksen jälkeen, eikä niille ole Cobi Rehabin kirjallista hyväksyntää.



TURVALLISUUSOHJEET

Suihku-/wc-tuoli saattaa kaatua tai rikkoutua, jos max. käyttäjäpainoraja ylittyy. Max. käyttäjäpainoraja on 325 kg.

Suihku-/wc-tuolia ei saa käyttää uima-altaissa tai ammeissa.

Tuotteen pintalämpötila saattaa nousta ulkoisen lämmönlähteen seurauksena esim. auringonvalo.

Suihku-/wc-tuoli Cleania saa käyttää ainoastaan tasaisella, kovalla lattialla, jonka max. kallistus on 3 astetta. Suurempi kallistuskulma lisää kaatumisriskiä.

Suihku- /wc-tuoli tulee asentaa oikein käyttökuntoon ennen käyttöä. Katso osio "Käyttöönotto".

2. Symbolit

Käyttöohjeessa/tuotteessa käytetään seuraavia symboleita	
	Varoitus!
	Vaatimustenmukaisuus, Medical Device Regulation (MDR), EU 2017/745
	Cobin tuotenumero
	Sarjanumero
	Valmistusvuosi
	Valmistaja
	Lääkinnällinen laite
	Max. käyttäjäpaino
	Katso käyttöohje
CE-merkki sijaitsee rungossa. Alla esimerkki CE-merkinnästä.	

	Cobi Rehab ApS Fuglebækvej 1D DK-2770 Kastrup Tel.: +45 70252522			
	XXL-Rehab Clean, 61cm 0142-061-000			325 KG
	0051783			
	2020	(01)05740000101288(21)0051783		
MADE IN TAIWAN				

3. Yleistä

Tämä käyttöohje sisältää paljon tärkeää tietoa suihku-/wc-tuoli Cleanin käytöstä sekä tuotteen käyttäjäkunnasta. Ohjeessa on myös paljon teknisiä tietoja tuotteesta.

Käyttöohjeen viimeisin versio on löydettävissä nettisivuiltamme. Tarkista, onko käsissäsi oleva ohje viimeisin versio.

Jos tarvitset käyttöohjeen, joka on kirjoitettu suuremmalla fontilla, tuotedokumentaatio on löydettävissä pdf-muodossa cobirehab.com. Pdf-tiedoston voi skaalata haluttuun fonttikokoon.

Voit aina olla yhteydessä Cobi Rehabiin +45 7025 2522 tai cobi@cobi.dk, jos haluat lisätietoja tuotteesta.

Cobi Rehab varaa oikeudet tuotemuutoksiin ilman ennakkoilmoitusta.

Tuotteen UDI-numero sijaitsee tuotetarrassa, joka löytyy rungon sivulta.

Tuotteen turvallisuustiedotteet ja takaisinvedot löytyvät nettisivuilta.

4. Käyttö

Suihku- / wc-tuoli on tarkoitettu wc- ja suihkukäyttöön henkilöille, jotka painavat max. 325 kg.

Tuotetta käytetään sairaaloissa, hoitokeskuksissa ja laitoksissa.

Konsultoi terapeuttia aina ennen tuotteen luovuttamista käyttöön.

Kontraindikaatiot

Valvo käyttäjiä, joilla on kognitiivisia häiriöitä, tuotetta käytettäessä.

⚠ Suihku- / wc-tuoli Clean saattaa kaatua, jos max. kuormitus ylittyy.

⚠ Älä käytä tuotetta ammeissa tai uima-altaissa.

5. Käyttöönotto

Tuotteen kokoaminen

Suihku- / wc-tuoli Clean koostuu kahdesta osasta: tuolin rungosta sekä selkäosasta.

1. Laita priikka jokaiseen pulttiin. Kiinnitä selkäosa tuolin runkoon asettamalla neljä pulttia ja priikka reikiin, kaksi kummallakin puolella. Kiristä pultit hyvin mukana tulevalla kuusiokoloavaimella.

Istuinsyvyyden ja selkäosan säätö

1. Istuinsyvyyttä voi säätää kolmeen asentoon. Valitse kaksi reikää (etu, keski tai taka) selkäosasta haluttuun istuinsyvyyteen. Ks. ohjeet ylhäältä.

Jalkojen korkeudensäätö

1. Jalkojen korkeutta voi säätää kuuteen asentoon löysäämällä ja kiristämällä neljää valmiiksi jalkoihin asennettua pulttia. Käytä kuusiokoloavainta säätämiseen.

Tarvittavat työkalut

1. Kaksi 5 mm kuusiokoloavainta, neljä kuusikulmaista allen-pulttia, neljä priikkaa.

Käytön aikana

Selkäosa voidaan säätää kolmeen eri syvyyteen. Selkäosan säätö ei vaikuta tuolin vakauteen.

6. Varastointi

Kun tuotetta ei käytetä, varastoi se kuivassa paikassa lämpötilaltaan -10 - 40 celsius-astetta.

7. Puhdistus ja huolto

Tuotteen runko ja istuin puhdistetaan vedellä ja tavallisella puhdistusaineella.

Desinfiointi

Tuote voidaan desinfioida etanolilla 70-85 % tai kloorituotteella, jonka pitoisuus min. 1000 ppm ja max. 10000 ppm.

⚠ Muista aina desinfioida suihku- / wc-tuoli Clean ennen sen siirtämistä uudelle käyttäjälle.

Tämä tehdään estämään ristikkäistartunnat ja infektiot.

Paikallisia puhdistus- ja desinfiointikäytäntöjä tulee aina noudattaa.

Huolto

Pultit ja prikat tulee tarkistaa säännöllisesti ja korvata uusilla, jos tarpeen.

⚠ Jos pultteja ja prikoja ei tarkisteta säännöllisesti, saattaa se johtaa tuotteen vioittumiseen.

8. Hävittäminen

Hävitä käyttämättömät tuotteet ympäristölle turvallisella tavalla.

Ota yhteys paikallisiin viranomaisiin tai Cobi Rehabiin saadaksesi lisätietoja tuotteen hävittämisestä/kierrättämisestä.

Kierrätys

Ota yhteys Cobi Rehabiin saadaksesi lisätietoja tuotteen osien kierrätyksestä.

9. Takuu

Cobi Rehab takaa, että tuote toimitetaan ilman toimitusvaurioita. Jos vastoin odotuksia, suihku-/wc-tuolissa on puutteita tai vikoja vastaanotettaessa, ottakaa välittömästi yhteys Cobi Rehabiin.

Lasku toimii myös takuuserifikaattina.

Takuu ei koske:

- kuluvat osat

Takuu ei ole voimassa, jos valmistaja arvioi, että tuotetta on käytetty virheellisesti.

Jos vika johtuu tuotteen virheellisestä käytöstä, huoltotyö sekä käytetyt varaosat laskutetaan.

Takuu ei koske:

- tuotteita, joiden sarjanumero, eränumero tai vastaava on poistettu tai merkittävästi vioittunut.

- tuotteita, jotka on korjannut valtuuttamaton henkilöstö.



Huollon puute voi vahingoittaa tuotetta, lyhentää sen käyttöikää tai vaikuttaa tuotteen suorituskykyyn.

9.1 Vaaratilanteet

Raportoi kaikki tuotteeseen liittyvät vaaratilanteet Cobi Rehabille.

9.2 Odotetun käyttöiän päätyttyä

Odotetun käyttöiän päätyttyä on tärkeää arvioida tuotteen kunto ennen käytön jatkamista.

Odotetun käyttöiän jälkeen, Cobi Rehab ei voi taata tuotteen vaatimustenmukaisuutta ja turvallisuutta, sillä Cobi Rehabilla ei ole kontrollia, miten tuotetta on käytetty tai onko se kulunut/vioittunut.

Kokonaisvaltaisen tuotearviointin tulee suorittaa pätevätytynyt henkilö, huomioiden minimissään, miten tuotetta on käytetty, käyttöolosuhteet ja sen osien kunto. Cobi Rehab voi aina suorittaa arvioinnin tarvittaessa.

10. Tekniset tiedot

Maksimi käyttäjäpaino	325 kg
Istuinleveys	610/710 mm
Säädettävä istuinsyvyys	400-520 mm
Säädettävä istuinkorkeus	440-590 mm
Käsitukien väli	650/750 mm
Kokonaisleveys	730/830 mm
Kokonaiskorkeus	790-940 mm
Hygienia-aukon koko	Ø240 mm, 350 mm pitkä
Istuin/Selkä/Käsituet	Polyuretaani
Runko	Pulverimaalattu kromimolybdeeniteräs / SAE41-30
Paino (61 cm/71 cm)	14/15 kg
ISO luokitus	09 33 07 03
Odotettu käyttöikä	7 vuotta
Riskiluokka	I
UDI-DI	5740000101288/5740000101295
Basic UDI	5740000100003MY
Tuotteen pintalämpötila voi nousta, jos tuote altistuu suoralle lämmönlähteelle esim. auringonvalolle.	

11. Tilaus

Model	Item number
Bariatric Bedside Commode Clean, 61 cm	0142-061-000
Bariatric Bedside Commode Clean, 71 cm	0142-071-000
Seat for Bedside Commode Clean, 61 cm	0150-999-022
Seat for Bedside Commode Clean, 71 cm	0150-999-023
Bedpan with cover	0140-999-001
Ferrules, rubber, 1 piece	0140-999-112



COBI REHAB[®]
The Positioning Company



MANUFACTURER

Cobi Rehab

Fuglebækvej 1D
DK-2770 Kastrup
Denmark
+45 7025 2522
cobirehab.com