



BRUKSANVISNING

Dusch- och toalettstol med hjul

En kraftig och bred dusch- och toalettstol med öppning under ryggstödet för att ge mer plats bakåt. Justerbara fotstöd så att användare med mycket hud på insidan av låren kan sitta med benen brett isär.

Dusch- och toalettstol med hjul används på sjukhus och på omsorgsboenden. Maximal användarvikt upp till 325 kg.



UPP TILL 325 KG

- Två bromsbara hjul.
- Extra vida butterfly armstöd finns som tillval.
- Finns i två storlekar, bredd 61 cm och 71 cm.
- Flera modeller av fotstöd
- Dusch- och toalettstol med hjul ger en bättre arbetsmiljö för omsorgspersonal och en bekväm och säker duschupplevelse för användaren.
- Extra långa armstöd.



Innehållsförteckning

1. Säkerhet	3
2. Symbolförklaring.....	4
3. Generellt	5
4. Användning.....	5
5. Tillämpning.....	6
6. Rengöring och underhåll.....	7
7. Transport och förvaring.....	7
8. Återvinning och bortskaffning.....	8
9. Garanti.....	8
10. Specifikationer	9
11. Tillbehör och reservdelar	10

1. Säkerhet



VARNING

Dusch- och toalettstol med hjul får inte användas utan noggrann instruktion av utbildad personal eller av personer som fått instruktion i användandet av dusch- och toalettstolen. Vid felaktig användning kan användaren komma till skada.

Används Dusch- och toalettstolen av personer som väger mer än den maximala användarvikten på 325 kg, ökar risken att dusch- och toalettstolen tar skada.

Bruksanvisningen ska läsas noggrant innan dusch- och toalettstolen används. Rikta speciellt din uppmärksamhet mot säkerhetsvägledningar markerade med

Cobi Rehab påtager sig inget ansvar för eventuella skador på produkten eller för personskador förorsakade av felaktig användning av Dusch- och toalettstolen med hjul.

Kontakta Cobi Rehab omedelbart om produkten är skadad eller om det saknas delar. Använd aldrig egna reservdelar.

Cobi Rehab kan inte hållas ansvarig för skador eller oförutsedda situationer som kan uppstå efter reparationer som gjorts utan skriftlig tillåtelse från Cobi Rehab.



SÄKERHETSVÄGLEDNING

Symbolen i denna bruksanvisning markerar en säkerhetsvägledning. Säkerhetsvägledningar ska följas noga.

Användare utan stå- och gångförmåga ska alltid liftas in och ur Dusch- och toalettstolen med hjul.

Dusch- och toalettstol med hjul har en användarvikt på 325 kg.

Yttemperaturen på dusch- och toalettstolen kan stiga om den utsätts för yttre värmekällor, till exempel solljus.

Dusch- och toalettstol med hjul kan på grund av sin bredd ha svårt att passera genom dörröppningar och nödutgångar.

Dusch- och toalettstol med hjul får bara användas på plant och hårt golv med en maximal lutning på 3°. Annars finns det en risk för att stolen tippar.

Se alltid till så att bägge hjulen är bromsade när användaren förflyttar sig till och från stolen, samt när användaren sitter i stolen.






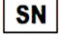





Använd inte Dusch- och toalettstol med hjul innan bägge armstöden är monterade. Användaren kan falla ut till sidan utan armstöd.












Brist på översyn av bultar kan förorsaka funktionsfel.

Desinficera alltid Dusch- och toalettstol med hjul innan den ska användas av en annan användare. Detta för att undvika korskontaminering.

2. Symbolförklaring

Följande symboler används i bruksanvisningen och/eller på produktens etikett.

	Var uppmärksam!
	Dubbelisolerad (klass II)
	Försäkran om överensstämmelse enligt direktivet för medicintekniska produkter EU 2017/745
IPX4	IP-klassifikation
	Kasseras genom miljövänlig avfallshantering
	Cobi artikelnummer
	Serienummer
	Tillverkningsår
	Tillverkare
	Medicinsk utrustning
	Max användarvikt
	Läs manual
CE-etiketten är placerad på sidan av ramen. Exempel på etikett kan ses här under.	

	Cobi Rehab ApS Fuglebækvej 1D DK-2770 Kastrup Tel.: +45 70252522			
	XXL-Rehab shower commode, 71 0150-071-000			325 KG
	0050857		MADE IN TAIWAN	
	2020			

3. Generellt

Denna bruksanvisning innehåller viktiga upplysningar om användningen av Dusch- och toalettstol med hjul för anpassad målgrupp. Den innehåller också en specifikationslista för produkten.

Den senaste versionen av denna bruksanvisning finner du på vår hemsida. Kontrollera att den version du sitter med nu är den senaste.

Om du har behov av en bruksanvisning med större skrift finns bruksanvisningen i PDF-format på www.cobirehab.se. Där kan du förstora upp skriftstorleken.

Du kan alltid kontakta Cobi Rehab på telefon 08-702 97 74 om du önskar fler upplysningar om Dusch- och toalettstol med hjul.

Cobi Rehab förbehåller sig rätten att ändra produktspecifikationerna utan föregående varning.


Dusch- och toalettstolens UDI-nummer framgår av etiketten som finns placerad på sidan av stolen.

Produktsäkerhetsmeddelanden och tillbakakallelse av produkten kan ses på hemsidan under <https://www.cobirehab.com/kunde-hos-cobi/viktig-produktinformation/>

4. Användning

Dusch- och toalettstol med hjul är framtagen till den bariatriska användaren i samband med förflyttning till och från badrummet, i duschen och under toalettbesök. Dusch- och toalettstol med hjul är anpassad till för inomhusbruk på till exempel sjukhus och omsorgsboenden.


Dusch- och toalettstol med hjul är anpassad till användare upp till 325 kg med nedsatt fysisk funktionsnivå.

 Dusch- och toalettstol med hjul är inte anpassad till att köras över upphöjningar som till exempel trösklar. Dusch- och toalettstolen får

endast köras på ett plant och hårt underlag för att förhindra risken att stolen tippar.

Rådfråga alltid en förskrivare innan Dusch- och toalettstol med hjul rekommenderas till en användare.

Dusch- och toalettstol med hjul kan användas i omgivning med en temperatur från -10° - 40° C och i en luftfuktighet mellan 20-80%.

 Dusch- och toalettstolen får inte användas i miljöer med hög salthalt (simbassäng eller simhall) eller i starkt sura eller basiska miljöer.


Kontraindikationer


Vid nedsatt kognitiv funktion ska användandet ske med tillsyn.

5. Tillämpning

Före användning

Armstöden ska vara korrekt monterade i hålen på sidan av Dusch- och toalettstol med hjul.


 Använd inte dusch- och toalettstolen förrän bägge armstöden är monterade. Användaren riskerar annars att falla ut mot sidan om armstöden inte är på plats.

 Var uppmärksam på att sitsen är korrekt monterad på stolens sittram.



Dusch- och toalettstol med hjul och butterfly armstöd.


Vid användning

 Användaren får inte använda fotstöden till att stå på eller som en steghjälp under förflyttning. Det kan medföra risk för tippning.

Klämrisk 

- Om armstöden sätts på plats när användaren redan sitter i stolen kan det uppstå en klämrisk mellan armstöd och sidan av stolen.

- Klämrisk av fingrar och andra delar av kroppen kan ske mellan dusch- och toalettstolens sittram, toalettöppning eller bäcken. Använd största möjliga försiktighet när dusch- och toalettstolen körs in över en toalettstol eller när bäckenet sätts in under sitsen.

 Se alltid till så att bägge hjulen är bromsade innan användaren flyttas till och från stolen och även när användaren sitter i stolen.




Hel sits med lock för bäckenöppning.



Bäckenet är lätt att sätt i och tömma.


6. Rengöring och underhåll

Dusch- och toalettstolens ram, sits och armstöd ska efter användning tvättas med kalk- och saltneutralt vatten med ett vanligt rengöringsmedel och sedan torkas av.

 Dusch- och toalettstolen får inte användas i miljöer med hög salthalt (simbassäng eller simhall) eller i starkt sura eller basiska miljöer.

Desinficering


Sitsen kan tas bort och desinficeras med etanol 70–85% eller med en klorprodukt min. 1000 ppm och max. 10 000 ppm.

 Desinficera alltid Dusch- och toalettstol med hjul innan den ska användas av en ny person. Detta för att undvika korskontaminering.

Eventuella lokala rutiner kring rengöring och underhåll ska alltid följas.

Bultar

Bultar och låsvred ska med jämna mellanrum ses över och dras åt.

 Brist på underhåll och översyn av bultar kan leda till funktionsfel.

7. Transport och förvaring

När Dusch- och toalettstolen med hjul inte är i bruk bör den förvaras torrt och i en temperatur mellan -10° – 40° C.

Dusch- och toalettstol med hjul är (utan användare) anpassad till land- och /eller lufttransport. Dusch- och toalettstol med hjul kan inte fällas ihop då ramen är fast.

För att undvika skador i rygg rekommenderas det inte att omsorgspersonal bär den 27 kg tunga stolen. Dusch- och toalettstolen med hjul tål att lyftas upp i ramen om den till exempel ska transporteras i ett motorfordon.

7.1 Långtidsförvaring

Vid långtidsförvaring (över tre månader) av Dusch- och toalettstolen med hjul bör den förvaras mellan -10°- 40° grader och i en luftfuktighet som inte överstiger 80%.

8. Återvinning och bortskaffning

Produkter som inte längre är i bruk ska bortskaffas på ett miljövänligt sätt. Kontakta Cobi Rehab eller kommunen för ytterligare information kring bortskaffning.

Kontakta Cobi Rehab för mer information kring återanvändning av Dusch- och toalettstol med hjul.

9. Garanti

Cobi Rehab garanterar att Dusch- och toalettstol med hjul är felfri när den levereras. Skulle det mot förmodan vara brister eller fel på stolen vid leverans, kontakta Cobi Rehab omedelbart.

Garantiperioden för Dusch- och toalettstol med hjul är ett år från köpedatum och täcker produktionsfel eller defekter vid leverans. Fakturan gäller som garantibevis.

Garantin gäller inte:


- produkter där serienummer, batchnummer eller liknande har försvunnit eller skadats väsentligt.
- produkter som har reparerats av ej auktoriserad person.

Garantin omfattar inte:

- slitagedelar.

Garantin gäller inte om Cobi Rehab bedömer att dusch- och toalettstolen med hjul har hanterats på ett olämpligt sätt eller använts i salthaltiga, sura eller basiska miljöer.

Vid skada på grund av felaktig användning faktureras både för service och reservdelar.

 Brist på underhåll kan skada Dusch- och toalettstolen med hjul, förkorta livslängden eller påverka stolens prestanda.

9.1 Oförutsedda händelser

Varje oförutsedd händelse som inträffar vid bruk av Dusch- och toalettstolen ska rapporteras till Cobi Rehab.

9.2 Efter förväntad livslängd

Efter den förväntade livslängden är det viktigt att det görs en samlad bedömning av produkten innan fortsatt bruk.

Efter den förväntade livslängden kan Cobi Rehab inte garantera lämplighet och säkerhet av produkten, då Cobi Rehab inte har någon kontroll över hur produkten är använd eller hur sliten den är.

Den samlade bedömningen av produkten ska göras av utbildad personal såsom förskrivare eller hjälpmedelskonsulent. Som ett minimum ska det bedömas hur produkten är använd, produktens tillstånd och produktens samtliga komponenter.

Cobi Rehab kan alltid göra en sådan bedömning.

10. Specifikationer

Max användarvikt	325 kg
Riskklass	I
Grundläggande UDI DI	5740000100004N2
Förväntad livslängd	7 år
Total längd	1170 mm
Total bredd med standard armstöd (utan fotstöd)	780/880 mm
Total bredd med butterfly armstöd (utan fotstöd)	870/970 mm
Sittsbredd med standard armstöd	610/710 mm
Sittsbredd med butterfly armstöd	750/850 mm
Sittdjup	560 mm
Sitthöjd	550 mm
Armstödbredd	60 mm
Bredd toalettöppning	Ø 240 mm, 350 mm lång
Avstånd från golv till undersidan av sits	445 mm
Avstånd från golv till körbygel	1000 mm
Avstånd från sits till ryggens översta kant	450 mm
Avstånd från sits till fotstöd	400/420/440/460/480 mm
Totalvikt Dusch- och toalettstol med hjul	27 kg
Svängbara armstöd	Ja
Fotstöd hopfällbara	Ja
Fotstöd svängbara och höjdställbara	Ja
Fotstödspolstring	PU skum
Låsbara hjul	Ja, 2
Vändradie	1580 mm
Ram	Pulverlackerad krommolybdenstål
Hjul	Ø125 mm, fasta
Sits/rygg/armstöd	Polyuretan
IP-klassifikation	IPX4
ISO-klassifikation	09 12 03 21
Riskvärdering	EN/ISO 14971: 2012
Generella krav och testmetoder	EN 12182

11. Tillbehör och reservdelar

Tillbehör	Artikelnummer
Butterfly armstöd höger (ger 7 cm extra bredd mellan armstöden)	0150-999-012R
Butterfly armstöd vänster (ger 7 cm extra bredd mellan armstöden)	0150-999-012L
Sits hel med lock för toalettöppning, 61 cm	0150-999-022
Sits hel med lock för toalettöppning, 71 cm	0150-999-023
Bäckenhink med plastlock	0140-999-001
Fotstöd standard Dusch- och toalettstol höger	0150-999-008
Fotstöd standard Dusch- och toalettstol vänster	0150-999-009
Fotstöd höjdbar Dusch- och toalettstol höger	0156-999-030
Fotstöd höjdbar Dusch- och toalettstol vänster	0156-999-031



COBI REHAB



TILLVERKARE

Cobi Rehab
Fuglebækvej 1D
DK-2770 Kastrup
Danmark
+45 7025 2522
cobirehab.com

LEVERANTÖR

Cobi Rehab
c/o Helio
Hornsbruksgatan 23 B
117 34 Stockholm
Sverige
Tel 08-702 97 74

cobirehab.se