

Snow Comfort



Kiitos, että olet valinnut Snow Comfort kelkan Classic-sarjasta.

Snow Comfort on erityiskelkka, joka on suunniteltu lapsille, teini-ikäisille sekä aikuisille. Toiminnallinen, urheilullinen muotoilu sisältää tubulaarisen kaiteen sekä työntökahvat tukevalla sivusuojalla. Korotettu selkätuki säädettävällä, liukuvalla päätuella varmistavat istuvuuden. Istuin osa jousitettu. Kelkassa on kolme säädettävää hihnaa jalka-, vyötärö- sekä reisosissa.

Kaksi itsenäistä metallijarrua ohjaus- ja jarrutehosteella ihanteelliseen ohjaukseen. Miellyttävä luistamaton istuin sekä integroidut jalkatuet tarjoavat erinomaisen tuen. Kelkkaa voi ohjata myös toinen henkilö takana olevalla erillisellä taitettavalla tasolla.

Kaksiosaiset jalakset on valmistettu ruostumattomasta teräksestä. Istuinosa on korkealaatuista kylmää ja valoa kestävästä muovista.

Kokoamisohjeet alla. Tarvitset vain ruuvimeisselin.

Kantokyky

Istuin: 1 henkilö 6-vuotiaasta alkaen, max. 80 kg (istuma-asennossa)

Takaosa: 1 henkilö 15-vuotiaasta alkaen, max. 80 kg (seisoma-asennossa)

Jos sinulla on mitään kysymyksiä, ole yhteydessä jakelijaan tai suoraan valmistajaan service@kwh-geschwenda.de

Kelkan osat



Korkeussäädettävä päätuki



Oikea ja vasen jarru



Takataso avustajalle



Jarru avustajalle



Turvahihnat vartalolle ja jaloille



Takataso kokoontaitettuna

Kokoaminen

- Irrota molemmat kierreruuvit takaistuimen tukiputkien päistä.
- Ohjaa työntökahva (esiasennettu päätuen kanssa) takaistuimen reikien läpi tukiputken päihin ja lukitse se kierreruuveilla.
- Löysää tähtikahvamutteria työntökahvan kiinnityskiskosta.
- Käännä käsivarren kiinnikkeet ylös kiinnityskiskoon ja kiristä ne ruuvilla ja tähtikahvamutterilla.
- Kiinnitä takataso mukana toimitetulla jousipidikkeellä.



Varoitus

Lue ohjeet huolellisesti ennen käyttöä ja säilö ne turvallisessa paikassa. Ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa vaikuttaa lapsen turvallisuuteen.

- Käytä kelkkaa vain valmistajan määrittelemään tarkoitukseen.
- Ainoastaan aikuinen saa koota kelkan.
- Ennen käyttöä huolehdi että ohjaus ja jarrut toimivat, ja että kaikki ruuvit ovat huolellisesti kiristetty.
- Hihnoja tulee käyttää, ja ne tulee kiinnittää istuinsaan.
- Ennen kelkan käyttöä, varmista että kelkassa istuja on tietoinen jarrujen käytöstä ja toiminnasta.
- Tuotetta ei saa modifioida millään tavalla.
- Itselukkiutuvat mutterit tulee korvata uusilla purkamisen jälkeen.
- Kokoontaitetun kelkan saa koota tai laittaa käyttöasentoon vain vastuullinen aikuinen.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vioittunut.
- Käytä ainoastaan valmistajan alkuperäisiä varaosia. Saatavilla olevat varaosta löytyvät www.khw-ersatzteile.de.
- Puhdista kelkka ympäristöystävällisillä aineilla ilman aggressiivisiä tai syövyttäviä ominaisuuksia.
- Säilytä kelkkaa ilmavassa ja kuivassa paikassa.

Takuu materiaali- ja valmistusvirheille: 24 kk ostopäivästä

Turvallisuusohjeet vanhemmille ja lapsille

Lapsellasi tulee olemaan mahtavia ja turvallisia hetkiä lumella KHW-kelkassa. Tämä edellyttää asianmukaista kelkan käyttöä.

- Huomioi minimi-ikä matkustajalle, maksimi käyttäjäpaino sekä istuinten määrä.
- Huom. Tuotetta tulee käyttää ainoastaan aikuisen valvonnassa.
- Snow Controlia ei voi käyttää lapset yksin, sillä he eivät pysty hallitsemaan, ohjaamaan tai jarruttamaan kelkkaa.
- Huom. Attention. Lapset saavat käyttää kelkkaa ainoastaan aikuisen valvonnassa. Kuristumisvaara remmeihin.
- Opeta proaktiivisesti lapsia, miten ohjata, jarruttaa ja koordinoida.
- Tarkista ohjaus ja jarrut ennen kelkan käyttöä.
- Snow Comfortia tulee käyttää ainoastaan kokonaisuena yksikkönä - sen purkaminen vaarantaa kaikki käyttäjät.
- Käytä tarvittaessa sopivaa suojaruustusta, mukaan lukien kypärä, tukevat kengät, käsineet ja suojat, jos tarvetta. Älä aja vapaasti roikkuvilla vaatteilla, sillä on olemassa kuristumisvaara.
- Aja vain lumella; vältä hyppäämästä hyppyreistä/rampeista tai jäällä ajamista.
- Ota muut huomioon.
- Kelkkarata ei saa olla liian jyrkkä, eikä siinä saa olla esteitä kuten kivia, puita jne.
- Kelkkarata ei saa koskaan ylittää vilkasta polkua tai tietä tai päättyä tiehen.
- Huomioi, että suuret nopeudet sekä kovat ja jäiset pinnat vaikuttavat suuresti ohjaukseen sekä jarrutukseen.

- Älä anna moottoriajoneuvojen vetää kelkkaa.
- Käytä sivukaiteita sivukahvoina.
- Ohjauksella ja jarruilla varustellussa kelkassa, älä levitä jalkojasi sivuille, vaan aseta ne kelkan päälle, jotta voit jarruttaa ja ohjata kelkkaa turvallisesti sivujarruilla ja ohjausyksiköllä.
- Käytön jälkeen poista lumi ja jää kelkasta.
- Asennusohjeet tulee säilyttää myöhempää tarvetta varten.

Käytä Snow Comfortia omalla riskillä sekä avustajan vastuulla.





KHW Kunststoff- und Holzverarbeitungswerk GmbH
Alte Lage 1a · 99331 Geratal OT Geschwenda

Telefon +49 3 62 05 - 7 49-0
Telefax +49 3 62 05 - 7 49 34

info@khw-geschwenda.de
www.khw-geschwenda.de

Version 1 © 2022



#gemeinsampurenhinterlassen

 **Klimaneutral**
Druckprodukt
ClimatePartner.com/12518-1907-1001